



**SCHEDA DESCRITTIVA**  
**CELEVIS PLUS 30 ML**

D.06.39

**REV.1**  
**03/2021**

Pag. 1 a 2

<b>Prodotto:</b>	CELEVIS® PLUS
<b>Formato:</b>	Tube da 30 ml con applicatore rettale multiuso.
<b>Descrizione:</b>	Dispositivo medico Classe IIB – Uso proctologico – CE 0426 Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND): M9002 SPRAY PROTETTIVI E LUBRIFICANTI SPRAY, GEL, LIQUIDI E IN CREMA
<b>Indicazioni:</b>	CELEVIS® Plus è utile per il trattamento di sintomi, quali bruciore, prurito e dolore durante l'evacuazione, associati a patologia emorroidaria, ragadi anali e stati irritativi della zona anale e perianale. CELEVIS® Plus in caso di cute lesa favorisce i processi riparativi e riepitelizzanti, idratando e proteggendo la cute e le mucose; lubrifica in caso di dolore da difficoltà di evacuazione. CELEVIS® Plus contribuisce a prevenire lesioni e irritazioni da sfregamento.
<b>Registrazione:</b>	Identificativo BD/RDM 2057687. Iscritto al Repertorio. Data pubblicazione 20/01/2021.
<b>Posologia:</b>	Utilizzare CELEVIS® Plus dopo ogni evacuazione. Usare anche più volte al giorno secondo necessità o parere medico. In caso di dolore durante l'evacuazione, applicare CELEVIS® Plus a scopo lubrificante prima di ogni evacuazione.
<b>Modalità d'uso:</b>	Svitare il tappo e rompere il sigillo di sicurezza con il retro-tappo. •Uso esterno (perianale e/o anale): applicare il gel sulla zona interessata con un lieve massaggio. •Uso interno (rettale): utilizzare l'apposita cannula annessa alla confezione e seguire le istruzioni che seguono. <b>1)</b> Svitare il tappo e avvitare la cannula. <b>2)</b> Lubrificare la parte esterna della cannula esercitando una lieve pressione sul tubo per permettere la fuoriuscita di una piccola quantità di gel. <b>3)</b> Procedere delicatamente all'applicazione interna ed esercitare un'ulteriore pressione sul tubo. <b>4)</b> Dopo l'uso rimuovere immediatamente la cannula, pulirla accuratamente con acqua e ricoprirla con l'apposito cappuccio.
<b>Modalità di conservazione:</b>	Conservare in un luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.
<b>Validità prodotto:</b>	36 mesi.
<b>Avvertenze:</b>	Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. L'uso continuativo del dispositivo medico non deve superare i 30 giorni. Utilizzare la cannula annessa alla confezione esclusivamente con CELEVIS® Plus. L'uso della cannula è strettamente personale. Poiché non sono disponibili dati completi, si raccomanda di utilizzare il prodotto esclusivamente su indicazione e sotto controllo medico in caso di: • gravidanza ed allattamento; • associazione con altri prodotti ad uso topico nella stessa destinazione d'uso di Celevis Plus.



**SCHEDA DESCRITTIVA**  
**CELEVIS PLUS 30 ML**

D.06.39

**REV.1**  
**03/2021**

Pag. 2 a 2

In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico. Non utilizzare se la confezione originale risulta aperta, danneggiata o incompleta.

**Ingredienti:**

Acido ialuronico sale sodico, miele di acacia, estratto secco *Centella asiatica*, estratto idroglicerico *Hamamelis virginiana*, acqua depurata, copolimero idrossietil acrilato/sodio acriloidimetil taurato, glicerina, esano-1,2-diolo, glicole caprilico, etilesil glicerina, polisorbato 60, sorbitano isostearato, disuccinato trisodico dell'etilenediammina, acido lattico.

Senza profumo. Senza parabeni. Nichel tested.

**Codice articolo interno:**

73110230

**Codice PARAF:**

A942873617