

IALOCLEAN

Gocce auricolari

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

INDICAZIONI

IALOCLEAN gocce auricolari è indicato per dare sollievo alla cute dell'orecchio soggetta ad irritazioni e desquamazioni. Grazie alla sua specifica formulazione promuove l'idratazione attenuando secchezza e prurito e protegge la cute dalla proliferazione di microrganismi.

COMPOSIZIONE

AQUA, ISOPROPYL ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, MANDELIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, BISABOLOL, PPG-26-BUTETH-26, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM HYALURONATE, BENZALDEHYDE.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO/UTILIZZO

Rimuovere il tappo di chiusura. Capovolgere il flacone e tenere il capo inclinato. Premendo delicatamente il flacone, applicare le gocce sul padiglione auricolare e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento. Non introdurre l'estremità del flacone contagocce nel canale dell'orecchio ed evitare che entri in contatto con la cute.

Dopo l'uso, chiudere il flacone e lavarsi le mani.

Adulti: 3-4 gocce, 2-3 volte al giorno.

Bambini sopra i 3 anni: 1-2 gocce, 2 volte al giorno.

L'applicazione del prodotto nei bambini deve essere effettuata da un adulto.

ALTRE CARATTERISTICHE

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

MANUTENZIONE

Non necessita di alcuna particolare manutenzione.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

Utilizzare il prodotto entro 12 mesi dalla prima apertura e comunque non oltre la data di scadenza.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservare il prodotto ben chiuso, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal calore.

L'applicazione del prodotto nei bambini deve essere effettuata da un adulto.

AVVERTENZE

In caso di fenomeni di sensibilizzazione interrompere il trattamento e consultare il medico. Non utilizzare su cute lesa. Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Infiammabile.

EVENTUALE TOSSICITA' DICHIARATA

Nessuna.

MODALITA' DI TRASPORTO

Numero ONU: 1987.

Il trasporto del prodotto durante i mesi autunnali e invernali (da novembre ad aprile) deve essere effettuato con camion coibentati; il trasporto del prodotto durante i mesi primaverili ed estivi (da maggio a ottobre) deve essere effettuato con camion a temperatura controllata ≤ 25 °C.

SMALTIMENTO IMBALLAGGI VUOTI

Astuccio (PAP 21) e foglio illustrativo (PAP 22): Raccolta carta.

Flacone contagocce (7) e tappo di chiusura (HDPE 2): Raccolta plastica.

Conferisci l'imballaggio vuoto in raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

CONFEZIONE

Flacone contagocce da 30 ml €.

NOME, RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLA PERSONA RESPONSABILE

FARMA-DERMA s.r.l. Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA

CLASSIFICAZIONE

Cosmetico.

Riferimento CPNP: **5076786**