

**ISOMAR OCCHI**  
**GOCCE OCULARI PER OCCHI ROSSI**  
**FLACONE 10ML**

**INDICAZIONI D'USO:** **Isomar Occhi** dona sollievo in caso di arrossamento, irritazione, bruciore, prurito e sensazione di corpi estranei e in seguito a lacrimazione ed affaticamento indotti da fattori quali: esposizione al vento e a raggi solari, polveri, smog, fumo, caldo secco, ambienti climatizzati, permanenza prolungata davanti a schermi video ed uso di lenti a contatto. **Isomar Occhi** concorre in maniera significativa a lenire i disturbi causati dal contatto dei pollini con la congiuntiva aiutando ad alleviare i sintomi allergici. **Isomar Occhi** aiuta nei casi di secchezza oculare e si può usare in presenza di qualsiasi tipo di lenti a contatto. Per una maggiore azione lubrificante e lenitiva, è consigliata l'instillazione di **Isomar Occhi** prima dell'applicazione delle lenti.

**ISTRUZIONI D'USO:** per un utilizzo corretto del prodotto è necessario seguire le seguenti indicazioni:

- aprire la confezione e alla prima somministrazione rimuovere il sigillo di protezione e il tappo;
- alzare il capo e tenere il flaconcino capovolto sull'occhio.
- abbassare delicatamente con un dito la palpebra inferiore e aumentare gradualmente la forza di schiacciamento delle dita sul flacone fino ad ottenere una goccia.
- Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale ogni 4-5 ore;
- chiudere l'occhio per qualche secondo;
- subito dopo l'uso chiudere il flacone. La soluzione può essere riutilizzata entro 6 mesi dalla prima apertura. Se necessario, l'operazione può essere ripetuta nell'altro occhio.

Il tappo utilizzato per **Isomar Occhi** è appositamente studiato per garantire la sterilità del prodotto durante l'utilizzo e l'ottimale erogazione, si consiglia di non premere con forza il flaconcino chiuso per evitare che dalla griglia del tappo possa uscire qualche goccia. È possibile che con il progressivo esaurimento della soluzione contenuta nel flacone sia necessario applicare una forza maggiore.

**POPOLAZIONE DI PAZIENTI A CUI IL DISPOSITIVO È DESTINATO:** Il dispositivo medico è destinato ad utilizzatori senza conoscenze specialistiche, seguendo le istruzioni d'uso fornite dal fabbricante. Il dispositivo medico è destinato ad essere utilizzato in ambiente domestico. All'utilizzatore sono fornite tutte le informazioni necessarie per un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.

**CONTROINDICAZIONI:** il dispositivo medico non è indicato per i soggetti con nota ipersensibilità ai componenti presenti nella formulazione.

**AVVERTENZE:** prima dell'uso leggere attentamente le informazioni fornite dal fabbricante. Non eccedere la dose consigliata. Interrompere il trattamento in caso di insorgenza di qualsiasi effetto indesiderato. Non utilizzare in concomitanza ad altri trattamenti topici. Non ingerire. Il prodotto è destinato unicamente all'uso oftalmico. Conservare all'interno dell'astuccio, in luogo asciutto, lontano dalla luce e dal calore, a temperatura compresa tra 5°C e 25°. Non forare o manomettere la confezione. Non utilizzare il prodotto se la confezione risulta aperta o danneggiata. Non utilizzare dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e conservato in modo corretto. Il prodotto è destinato a pazienti adulti. Non vi sono dati specifici relativi all'uso del prodotto su bambini e donne incinta. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Si raccomanda di lavare accuratamente le mani prima di applicare la soluzione e di non toccare con le mani la punta dell'erogatore. Durante la somministrazione della soluzione, si raccomanda di non toccare la membrana congiuntivale con l'estremità del flaconcino.

La soluzione deve essere utilizzata entro 6 mesi successivi alla prima apertura del flacone. Per una corretta conservazione si raccomanda di richiudere correttamente il flacone al termine di ciascun utilizzo. Non disperdere il flacone nell'ambiente dopo l'uso. In caso di incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico, segnalare immediatamente al fabbricante e all'Autorità Competente dello stato membro in cui l'incidente si è verificato.

**CONFEZIONE:** flacone da 10 ml.

**POSOLOGIA:** 1-2 gocce per occhio ogni 4/5 ore. Si consiglia di intervallare cicli di trattamento con delle sospensioni di 7 giorni. Ciascun ciclo non deve superare i 30 giorni di trattamento.

**COMPOSIZIONE/COMPOSITION:** Purified Water, \*Sea Water (28-30%), Jacobaea Maritima Extract (0,01%), Calendula Officinalis Flower Water (0,1%), Centaurea Cyanus Flower Water (0,1%), Helichrysum Italicum Flower Water (0,1%), Euphrasia Officinalis Flower/Leaf/Stem Water (0,1%), Hydroxypropylmethylcellulose (0,2%), Sodium Hyaluronate (0,2%).

\*Isotonic

**Cod.GA18918**