


LTF

gocce oculari

NOME	LTF gocce oculari	cod. 20FG745-A1
Tipo carta	USOMANO 50gr/mq bianco	
F.to carta	100 x 300 mm.	
Piega:	SI finito 24 mm	
Stampa:	1 colore NERO	

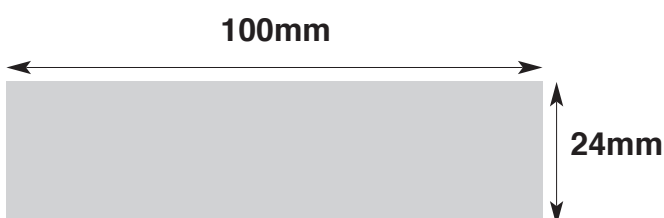

2° Bozza
del 03-09-2019

LTF

GOCCE OCULARI

Soluzione oftalmica a base di ipromellosa e lattoferrina

Descrizione:

LTF è una soluzione oftalmica contenente ipromellosa, che lubrifica e idrata la superficie oculare. La formulazione contiene anche la lattoferrina, una sostanza normalmente presente nel fluido lacrimale, che modulando la presenza del ferro contribuisce a inibire la crescita microbica. LTF è utile in tutti i casi di alterazione del film lacrimale, causato dall'esposizione ai raggi solari, dal vento, dall'aria condizionata e dall'utilizzo di schermi digitali.


Indicazioni:

Soluzione oftalmica lubrificante indicata nella secchezza oculare e nelle sintomatologie legate agli stati infiammatori della superficie oculare.

Utile durante e dopo:

- l'esposizione prolungata ai raggi solari;
- la permanenza in ambienti climatizzati;
- l'utilizzo prolungato di schermi digitali;
- il contatto con sostanze detergenti.

Modalità d'uso:

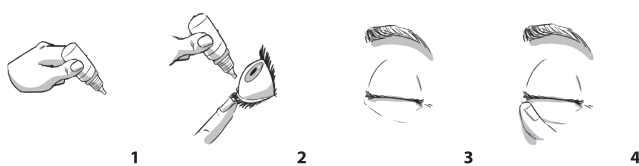

1. Tenere il flacone a testa in giù tra il pollice e le altre dita.
2. Abbassare la palpebra inferiore e posizionare la punta del flacone vicino all'occhio senza toccare.
3. Applicare le gocce raccomandate e chiudere gli occhi delicatamente per distribuire il prodotto uniformemente sulla superficie oculare.
4. Premere il dito sull'angolo interno dell'occhio verso il naso e mantenerlo per 1 minuto, tenendo l'occhio chiuso.

Avvertenze:

- In rarissimi casi, in pazienti con superficie oculare gravemente danneggiata, l'uso di soluzioni oftalmiche contenenti fosfati è stato associato a calcificazione corneale. Pertanto, consultare il proprio specialista prima della somministrazione del prodotto nel caso di cheratopatia a bandelletta o depositi di calcio sulla cornea.
- Il prodotto è sterile fino all'apertura;
- Evitare il contatto della punta del flacone con gli occhi, le superfici circostanti, le mani o altre superfici, per evitare la contaminazione della soluzione;
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso;
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ad uno qualsiasi dei componenti;
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra;
- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico;
- Proteggere da fonti di calore e tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Non ingerire;
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione;
- Il prodotto deve essere utilizzato entro 30 giorni dall'apertura. Eliminare eventuale prodotto residuo propriamente nella raccolta differenziata;
- In caso di problemi persistenti, consultare il medico oculista;
- Non utilizzare il prodotto continuativamente per più di 30 giorni.

Composizione:

Ipromellosa, Lattoferrina, N-idrossimetilglicinato sodico, EDTA sale disodico, Potassio idrato, Sodio fosfato monobasico, Sodio fosfato bibasico, Sodio cloruro, Acqua depurata.

Flacone da 8 ml

 Italdevice S.r.l., Via Laurentina km 26,700, 00071 Pomezia (RM)

Distribuito da:

OFFHEALTH S.p.A. Via Giovanni Paisiello 10, 50144 Firenze, Italia



STERILE A



OFFHEALTH