



OFTASECUR

Spray oculare senza conservanti a base di Liposomi di **Biosecur®** e Ipromellosa

Rev.: 07/2021

DESCRIZIONE: OFTASECUR **spray oculare** è una soluzione protettiva e lenitiva per la parte esterna dell'occhio.

OFTASECUR **spray oculare**, grazie alla sua formulazione brevettata, aiuta a prevenire e controllare le infezioni nella zona perioculare e dona sollievo in caso di irritazione oculare e palpebrale. La sua attività, propria degli estratti di Biosecur®, controlla la carica batterica ed il rischio di possibili processi infettivi della zona perioculare e dell'occhio.

OFTASECUR **spray oculare** contiene liposomi di Biosecur®, derivati biologici da estratto di agrumi che contiene bioflavonoidi (con dimostrata attività antimicrobica. La presenza di Ipromellosa, un derivato della cellulosa con proprietà viscoelastiche e igroscopiche, aiuta a mantenere la zona perioculare più idratata.

OFTASECUR **spray oculare** è ben tollerato anche per trattamenti protratti, non è tossico, nè irritante o allergizzante.

CAMPO D'IMPIEGO:

Irritazione palpebrale e oculare. Aiuto nella prevenzione delle infezioni dell'occhio e suoi annessi, anche in campo chirurgico oculare.

MODALITÀ D'USO:

Rimuovere il trucco dagli occhi prima dell'uso.
Erogare 1-2 spruzzi sulle palpebre chiuse da una distanza di circa 10 cm, 3-4 volte al giorno, evitando ogni diretto contatto dell'erogatore con la cute o con la rima palpebrale.

COMPOSIZIONE: 100 ml contengono: Biosecur® 0,2g, Ipromellosa 0,15g, Fosfolipidi S80, Acido borico, Sodio tetraborato decaidrato, Cloruro di sodio, Acqua distillata. Non contiene conservanti.

AVVERTENZE

- Non utilizzare il prodotto se allergici o ipersensibili ad uno qualsiasi dei componenti
- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico

- Utilizzare il prodotto entro 60 giorni dalla prima erogazione
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione
- Non usare il prodotto se il flaconcino è danneggiato
- Solo per uso oftalmico esterno
- Non spruzzare il prodotto sull'occhio aperto
- Non toccare la superficie dell'occhio con il nebulizzatore
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso
- In caso di applicazione di più prodotti lasciare un intervallo di almeno 10 minuti
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- **Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini**

CONFEZIONE: flacone spray riempito a 8 ml

 **OFFHEALTH S.p.A.** Via G. Paisiello 10, 50144 Firenze, Italia

RACCOLTA DIFFERENZIATA			
ASTUCCIO	FOGLIETTO	CONTENITORE	TAPPO
			
CARTA		PLASTICA	
Verifica le disposizioni del tuo comune			
CONFERISCI IN RACCOLTA SOLO IL CONTENITORE VUOTO			

