

 Stewart Italia <small>CHEMICAL & PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Srl</small>		Fascicolo Tecnico		FT/CE/ 08
<i>Data Emissione</i>	<i>Aggiornamento</i>		<i>Allegato 12 - Scheda Tecnica</i>	
15/01/200 9	<i>Data</i> 15/11/2018	<i>Indice</i> 2	OTOBOR SPRAY AURICOLARE	
				<i>Pagina 1 di 2</i>

OTOBOR SPRAY AURICOLARE

SCHEDA TECNICA

Tipologia di prodotto	Spray auricolare ad azione igienizzante
Packaging – condizionamento primario	Flacone in vetro da 50 ml con erogatore spray verticale
Condizionamento secondario	Astuccio di cartone
Volume dichiarato	50 ml
Prodotto di riferimento	OTOBOR SPRAY AURICOLARE
Caratteristiche della formula	Soluzione limpida incolore
Indicazioni	È un dispositivo medico ad uso otologico utile nell'igiene specifica della cavità auricolare nonché per la rimozione degli eccessi di cerume riducendo, così, i rischi di proliferazioni batteriche e micotiche nel canale auricolare. Il dosaggio dell'Otobor è di 2-3 spruzzi per cavità auricolare, secondo le necessità o consiglio medico. Può essere usato più volte al giorno.
Avvertenze	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare di spruzzare negli occhi. Conservare la confezione ben chiusa in luogo asciutto, a riparo dalla luce e da fonti di calore. Non utilizzare il prodotto al di sotto dei 3 anni d'età. Non utilizzare su cute lesa. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. In alcuni casi la nebulizzazione può causare un lieve e transitorio senso di irritazione locale e/o di vertigini. L'uso da parte di più soggetti può facilitare la trasmissione di infezioni
Modalità d'uso	Per il suo utilizzo, seguire le seguenti indicazioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se necessario, immergere il flacone in acqua tiepida (bagnomaria) per qualche minuto; 2. Togliere il cappuccio di protezione dell'erogatore; 3. Sciacquare l'erogatore prima dell'utilizzo; 4. Inclinare il busto e ruotare la testa di 45°, introdurre l'imboccatura dell'erogatore all'ingresso della cavità dell'orecchio e premere una o più volte fino a farne uscire la quantità desiderata. 5. Trazionare il padiglione auricolare verso l'alto ed indietro per raddrizzare il Condotto Uditivo Esterno (CUE); 6. Attendere qualche secondo per fare agire la soluzione, sollevare la testa e asciugare il liquido in eccesso; 7. Ripetere l'operazione secondo necessità; 8. Pulire l'erogatore; 9. Rimettere il cappuccio di protezione dell'erogatore
Stoccaggio	Temperatura Ambiente
Colore	Chiaro/Limpido

<i>Data Emissione</i>	<i>Aggiornamento</i>		<i>Allegato 12 - Scheda Tecnica</i>	<i>Pagina 2 di 2</i>
15/01/2009	<i>Data</i> 15/11/2018	<i>Indice</i> 2	OTOBOR SPRAY AURICOLARE	

pH	4.5 +/- 5%	
Odore\Sapore	Caratteristico	
Ciclo di vita	36 mesi	
PRINCIPALI CARATTERIZZANTI		
NOME	FUNZIONE	%
ACQUA	Agente solvente	93,80
SODIO CLORURO AL 3%	Agente disgregante	3%
ECCIPIENTI		
ACIDO BORICO	Agente Acidificante/Conservante	
BORATO DI SODIO	Correttore Di Acidità	
EDTA DISODICO	Conservante	
ACIDO SORBICO	Agente Acidificante/Conservante	