

NU-GEL

Idrogel con alginato



Reidrata il
tessuto necrotico e ne
facilita lo sbrigliamento

Johnson & Johnson
WOUND MANAGEMENT
WORLDWIDE
A division of ETHICON, S.p.A.

NU-GEL*
Idrogel con alginato



NU-GEL

Idrogel con alginato

Reidrata il tessuto necrotico e ne facilita lo sbrigliamento


NU-GEL è studiato con il preciso scopo di creare un ambiente umido, ideale alla cicatrizzazione nel trattamento di:



Ferite secche con escara



Ferite molli necrotiche

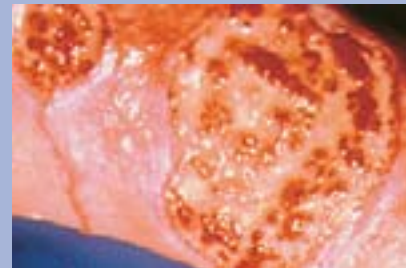


Ferite granuleggianti con fibrina


Come agisce NU-GEL

NU-GEL è un gel amorfo, trasparente, idroattivo, contenente alginato di sodio. L'idrogel crea un ambiente umido, ideale alla cicatrizzazione della ferita, che facilita l'autosbrigliamento naturale, mentre la componente di alginato ne ottimizza le proprietà assorbenti. Il gel è indicato per ammorbidire e idratare l'escara, promuovendo la reidratazione della ferita.

Struttura

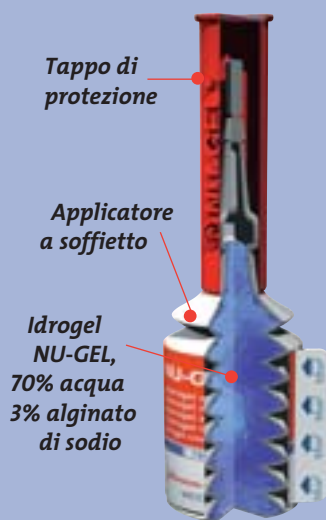

Meccanismo d'azione

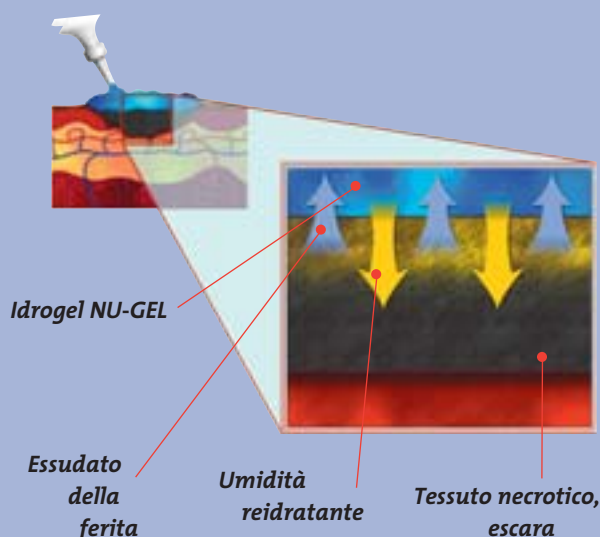

Più facile da manipolare

Una sperimentazione condotta su 65 pazienti, la quasi totalità con ulcere da decubito difficili da medicare, ha dimostrato che NU-GEL è significativamente più facile da applicare con precisione¹ e con una sola mano rispetto ad un noto prodotto idrogel.

Più efficace

NU-GEL reidrata delicatamente e con efficacia le ferite necrotiche con escara² e crea un ambiente umido, ideale alla cicatrizzazione di ferite granuleggianti ed epitelializzanti. L'alginato incrementa l'assorbimento di NU-GEL³, che può essere lasciato in situ più a lungo grazie alla migliorata consistenza.

Come usare NU-GEL

Preparazione



Scegliere un flaconcino di NU-GEL idoneo alla dimensione della ferita: 15g per una ferita di 5 cm x 5 cm; 25 g per una da 7 cm x 7 cm. Rimuovere l'etichetta protettiva (per le istruzioni sulla manipolazione, leggere a tergo dell'etichetta).



Pulire la ferita irrigandola con soluzione fisiologica.

Applicazione



L'erogatore del flaconcino consente di applicare il gel con precisione su tutte le ferite, comprese quelle profonde.



Applicare uno strato di almeno 5mm di spessore di NU-GEL. Il flaconcino è esclusivamente monouso per garantire l'applicazione in condizioni di sterilità.

Precauzioni: qualora insorgesse un'infezione durante il trattamento della ferita, iniziare un'appropriata terapia antimicrobica. Il trattamento con NU-GEL può continuare sotto controllo medico.

Come coprire e proteggere il gel

Scegliere un tipo di medicazione secondaria idonea alla quantità di essudato



Assenza di essudato

Applicare la pellicola adesiva semipermeabile BIOCLUSIVE* (medicazione trasparente) sopra la ferita per trattenere il gel nella posizione corretta.



Essudato abbondante

Applicare la medicazione adesiva idropolimerica TIELLE* oppure ...



... la medicazione non adesiva ADAPTIC*.



Se opportuno, coprire con medicazione secondarie come TOPPER* 8/12 o SURGIPAD*

NU-GEL

Idrogel con alginato

Cambio della medicazione

A seconda della quantità di essudato, NU-GEL può essere lasciato sulla ferita fino a tre giorni. Va cambiato in caso di perdite essudative dalla medicazione secondaria. Irrigare la ferita con una soluzione fisiologica, quindi riapplicare NU-GEL e la medicazione secondaria come indicato dal caso.

Frequenza del cambio della medicazione

Letto della ferita	Nuova applicazione
Necrosi secca	Massimo 3 giorni
Necrosi molle	1-3 giorni†
Escara	1-3 giorni

† A seconda dei livelli di essudato



Crea un ambiente umido ideale alla cicatrizzazione



NU-GEL*
Idrogel con alginato

Dati per l'ordinazione

Codice	Capacità flaconcino	Flaconcini per scatola
MNG415	15g	1 sc. da 10
MNG425	25g	1 sc. da 6

Reference

1. Young, T, et al. Proceedings of the European Conference on Advances in Wound Management, 1997, Macmillan Magazines Ltd, London.
2. Millward, P. British Journal of Nursing, 1995, Vol. 4, No. 15.
3. Johnson & Johnson Medical, UK 97007/9.4.

Questo foglio illustrativo è stato approvato da European Regulatory Affairs
Johnson & Johnson Medical, Gargrave, GB

Johnson & Johnson
WOUND MANAGEMENT
WORLDWIDE
A division of ETHICON S.p.A.

Johnson & Johnson Wound Management
Ethicon S.p.A.
Via del Mare 56, 00040 Pratica di Mare
Pomezia, Roma
Servizio Clienti
Tel: 06 91194500 Fax: 06 91194505

* Marchio © JJM Ltd 2000

NU-GEL
Idrogel con alginato

TIELLE
Medicazione sterile chiusa di Garzofalo

ACTISORB
PLUS

IB0031