

GLUCOFIX[®] TECH

GUIDA RAPIDA AL TEST DELLA GLICEMIA



1
Lavare e asciugare accuratamente le mani



2
Inserire un sensore nel glucometro fino in fondo



3
Inserire una lancetta nuova e riposizionare il cappuccio sulla penna pungidito



4
Impostare la profondità di penetrazione della lancetta



5
Caricare la penna pungidito



6
Effettuare la digitopuntura



7
Avvicinare la goccia di sangue all'estremità del sensore



8
Il risultato del test è visualizzato dopo 5 secondi



9
Smaltire la lancetta (ago) utilizzata e il sensore in sicurezza grazie ai tasti di espulsione integrati direttamente nella penna pungidito e sul retro del glucometro