

No. documento: U-422200, edizione 6

Istruzioni per l'uso: Sonda duodenale

Indicazioni

Per scopi diagnostici durante l'aspirazione di fluidi intestinali o per uso terapeutico..

Controindicazioni

Il prodotto non deve essere utilizzato su pazienti che sono ipersensibili ai materiali utilizzati.

Possibili effetti collaterali

L'uso del prodotto in caso di ipersensibilità del paziente ai materiali utilizzati può causare una reazione allergica.

Materiali utilizzati

Il prodotto è realizzato in polivinilcloruro non ftalato (PVC – DEHP free).

Istruzioni per l'uso:

1. Preparare le mani in conformità con le istruzioni di igiene prima di utilizzare il prodotto.
2. Aprire l'involucro sterile nella posizione prevista utilizzando la tecnica asettica. In caso di imballaggio danneggiato, gettare il prodotto.
3. Estrarre il prodotto dalla busta, controllarlo visivamente in modo che non sia danneggiato meccanicamente. Utilizzare subito dopo aperto.

Misure precauzionali

Il prodotto è monouso.

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale medico adeguatamente qualificato.

In caso di riutilizzo, esiste il rischio di infezione da malattie trasmissibili con sangue e altri fluidi corporei o la possibilità di un'infezione batterica.

La sterilità può essere garantita se l'imballaggio non è aperto o danneggiato.

Collegare la sonda solo a un sistema di alimentazione o ad una siringa con una connessione per catetere.

Dopo l'uso, il prodotto deve essere scartato in conformità con la pratica medica.

Il tempo massimo di utilizzo è di 7 giorni.

Il tempo di utilizzo massimo in combinazione con cibi grassi è di 24 ore.

Se il prodotto non viene utilizzato secondo le istruzioni fornite da TIK d.o.o, la società non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o altri danni che potrebbero verificarsi.

Stoccaggio

Prima dell'uso del prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e pulito a temperatura ambiente.

Proteggere dall'esposizione di luce diretta

Se il prodotto e la confezione sono integre, la validità della scadenza, è di 60 mesi.

Produttore:

TIK d.o.o., Proizvodnja medicinskih pripomočkov
Goriška cesta 5b
5222 Kobarid, Slovenija
Tel: +386 (0)5 389 07 00
E-mail: info@tik.si



Simboli utilizzati sul etichetta e sulla confezione esterna:

