

	<h1>SCHEDA TECNICA</h1>	Rev. 3
		Data 19.12.06
		Pag. 1/2
Merocel Tamponi Nasali per epistassi e post-operatori		

Prodotto da: Medtronic Xomed – Jacksonville, Florida, U.S.A.

Marcatura CE: Ai sensi direttiva 93/42/CEE

Classe: II a codici: 400400-400402-400406-400413-400424-400405-400409-400410-400421-460406-400411-400412
I a codici: 400416

Materia prima: Acetato di polivinile idrossilato.
Purezza: >99% (tracce di polivinilalcol:<1%)
Derivazione sintetica 100%
Latex free.

Sterilizzazione: Raggi Gamma

Validità: 3 anni

Descrizione: Merocel è un prodotto sintetico, monouso, ottenuto schiumando a cellula aperta un polimero biocompatibile, producendo così reticoli cellulari, con fori di dimensioni controllate, saldati nei punti di incontro, per evitare che si stacchino frammenti o filamenti. Merocel è altamente assorbente, compatto, morbido, ma molto resistente, caratteristiche che escludono la possibilità di contaminare la ferita con filamenti, eliminando gli inconvenienti causati dai frammenti di spugna in cellulosa, come, per esempio, aderenze, granulomi, infezioni, emboli. I tamponi nasali Merocel garantiscono un veloce ed efficace tamponamento nelle epistassi e nel postoperatorio. Ogni tampone è altamente compresso, caratteristica che facilita l'inserimento ed il posizionamento nella cavità nasale. Una volta inserito ed idratato, il tampone nasale si espande procurando una leggera e costante pressione all'interno della cavità nasale. I tamponi nasali Merocel non rilasciano filamenti che potrebbero aderire alla mucosa nasale, permettendo una rimozione semplice ed atraumatica.
Sono disponibili in varie forme e misure, per soddisfare al meglio le esigenze dei chirurghi.

Approvata dal P.M. :
Antonio Licata

Merocel
Tamponi Nasali per epistassi e post-operatori**Specifiche Tecniche:**

Densità: bassa densità di cellule per mm³. Questa densità, tra le numerose prese in esame, è risultata quella che conferisce la maggiore capacità di assorbimento per unità di volume.

Il calibro dei fori di comunicazione tra le micro cavità del tampone è compreso tra i 15 e 25 micron.

Codice	Lunghezza cm.	Larghezza cm.	Spessore cm.	Q.tà x scatola
400400	4.5	2	1.5	20
400402	8	2	1.5	20
400406	10	2.5	1.5	10
400413	8	3	1	10
400416	3.5	2.5	1.5	10
400424	8	3	1.5	10

Con filo di repere (in poliestere)

Codice	Lunghezza cm.	Larghezza cm.	Spessore cm.	Q.tà x scatola
460406	10	2.5	1.5	10
400421	5.5	2.5	1.5	20

Con cannula in silicone ("medical grade")

Codice	Lunghezza cm.	Larghezza cm.	Spessore cm.	Q.tà x scatola
400405	8	2	1.5	20
400409	4.5	2	1.5	20
400410	8	2	1.5	20
400411	8	3	1.5	10
400412	5.5	2.5	1.0	20

N.B: le dimensioni si riferiscono a prodotto idratato.

Confezionamento:

Ogni singolo tampone Merocel è presentato in confezione sterile apirogena secondo i seguenti accorgimenti:

- busta interna in alluminio termosaldato "a vuoto"
- busta esterna in polietilene

Ogni busta riporta, in forma stampata ed in codice a barre, sia il numero di lotto sia la data di scadenza.

Confezionamento latex free.

Uno per busta, 10 o 20 buste per confezione a seconda del codice.