

 **smith&nephew**

ALLEVYN[®] HEEL

Medicazione idrocellulare
non adesiva conformata
per il tallone

Medicazione anatomicamente conformata per
un eccellente comfort del paziente ed una
riduzione delle forze di pressione

ALLEVYN[®] Heel, medicazione anatomicamente conformata per un eccellente comfort del paziente ad una riduzione delle forze di pressione

Il tallone è, per importanza, la seconda zona a rischio di ulcere da decubito¹ dopo il sacro. ALLEVYN Heel è stato realizzato per adattarsi morfologicamente ed anatomicamente al tallone, garantendo allo stesso tempo il comfort ottimale al paziente e permettendo la migliore gestione possibile di lesioni a tale livello.

ALLEVYN Heel presenta una struttura tristratificata unica, composta da uno strato non aderente a contatto diretto con la ferita, uno strato centrale idrocellulare morbido e particolarmente assorbente ed infine un film esterno rosa impermeabile ai liquidi ed ai batteri. La medicazione ALLEVYN Heel sfrutta i ben noti benefici dell'ambiente umido particolarmente indicato per la cicatrizzazione delle ferite. A contatto con l'essudato la medicazione non va incontro a sfaldamento.

Il risultato finale è una facile, pulita e migliore cicatrizzazione di quelle ferite che solitamente si sono rivelate di difficile gestione clinica, con riduzione del dolore e del trauma per il paziente.

Vantaggi

La struttura unica di ALLEVYN Heel permette di ricreare un ambiente umido a livello della superficie della ferita particolarmente favorevole alla sua guarigione, riducendo il rischio di formazione di escare e favorendo una rapida cicatrizzazione riducendo il dolore ed il trauma per il paziente.

Migliore assorbimento e gestione dell'essudato

Gli studi clinici ed in vitro² hanno dimostrato che le medicazioni non adesive ALLEVYN possono essere lasciate sulla lesione per 7 giorni in accordo con il protocollo locale di trattamento. Ciò è dovuto a diverse proprietà:

- Lo strato a contatto diretto con la ferita assorbe l'essudato, anche viscoso, e lo deposita all'interno della medicazione.
- Lo strato centrale idrocellulare assorbe l'essudato cinque volte di più rispetto a quanto non si sia osservato con medicazioni simili a base di idrocolloidi, alginati o altre schiume e lo intrappola nello spessore della schiuma.
- Il film esterno traspirante permette l'evaporazione e quindi l'allontanamento dei fluidi in eccesso.
- Il risultato è l'ottenimento di un ambiente ottimale per il processo di guarigione della lesione.

Non aderente

Lo strato non aderente bianco evita che la medicazione aderisca alla ferita.

Non adesivo

ALLEVYN Heel non contiene alcun prodotto adesivo, riducendo in questo modo il rischio di traumi su tessuti particolarmente delicati, ad ogni cambio di medicazione.

Di facile applicazione

ALLEVYN Heel assorbe e trattiene sia l'essudato che i detriti cellulari riducendo i cambi di medicazione rendendoli molto semplici per gli operatori sanitari e poco traumatici per il paziente. La progressione dell'assorbimento dell'essudato può essere controllata attraverso lo strato superiore rosa.

Morbido e soffice

La medicazione ALLEVYN Heel è morbida e soffice: garantisce un elevato comfort al paziente e contribuisce ad un efficace scarico pressorio.

Indicazioni


ALLEVYN Heel è particolarmente indicato per la gestione di ferite in via di granulazione a livello del tallone o di sedi anatomiche simili. È possibile utilizzare questa medicazione anche su ferite necrotiche in combinazione con INTRASITE[®] Gel.

Applicazione

Applicare il lato bianco non aderente a livello del tallone e fissarlo in posizione con un leggero bendaggio o con un film trasparente adesivo (per esempio OPSITE[®] FLEXIFIX[®]).

Precauzioni

Non utilizzare le medicazioni ALLEVYN insieme ad agenti ossidanti quali soluzioni di ipoclorito o perossido di idrogeno; queste sostanze possono danneggiare lo strato idrocellulare della medicazione. Raramente sono stati riferiti arrossamenti della cute perilesionale durante l'utilizzo di ALLEVYN. In alcuni casi, l'arrossamento della cute dipende dalla fragilità della stessa o dal contatto prolungato con l'essudato. Sono anche stati segnalati rari casi di ipersensibilità alla medicazione. In caso di sensibilizzazione o arrossamento, interrompere il trattamento e fare riferimento al personale sanitario.

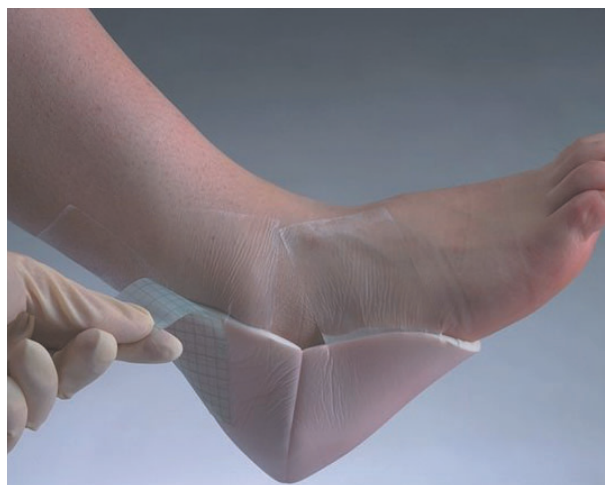

Disponibilità prodotto

Codice	Misure Medic. (cm)	Medicazioni per confezione	Codice ISO di Rimborsabilità(*)
66007630	10,5 x 13,5	5	09.21.12.012

(*) Rimborsabile ai sensi dell'Art. 1 comma 5 D.M. 332/99

ALLEVYN Heel è prodotto e confezionato secondo la direttiva 93 / 42 / CEE.

RIFERIMENTI

1. "Studio comparativo tra un bendaggio protettivo del tallone ed una medicazione idrocellulare conformata per il tallone" Torra J Bou, JE et al. Rol Nursing Journal, Spain May 2002 Clinical trial;
2. "Gestione delle lesioni diabetiche del tallone con le medicazioni ALLEVYN Heel" Warret L. Il piede diabetico 2000; 3 (1): 21-22

Wound Management www.smith-nephew.it

Smith & Nephew S.r.l.
Via De Capitani 2A
20041 Agrate Brianza (MI) - Italia

T +39 039 6094 1
F +39 039 651535
contattaci@smith-nephew.com

*Marchio di Smith & Nephew