

CUTIMED CAVITY

MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO PER FERITE CAVITARIE

DESCRIZIONE	Medicazione in schiuma di poliuretano adsorbente idrofobica, sterile. Molto morbida, conformabile e assorbente, in grado di creare nella ferita le condizioni ideali per un processo di guarigione in ambiente umido.														
INDICAZIONI	<p>Trattamento di ferite cavitare con livello di essudato da moderato ad elevato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piaghe da decubito • ferite da escissione di fistole e ascessi • ferite cavitare quali ulcere venose, ulcere diabetiche, ferite da trauma e post-operatorie, ferite deiscenti <p>In base alla quantità di essudato, la medicazione può rimanere in sito fino a 5/7 giorni.</p>														
CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO	<p>Cutimed Cavity è composta da una struttura in schiuma di poliuretano a celle aperte, disposte in una sequenza regolare, per garantire il massimo assorbimento per capillarità. La medicazione può essere tagliata a misura, sagomata, ed applicata seguendo i contorni fisiologici della ferita. Data la forte assorbenza del prodotto, si consiglia di riempire la ferita solo al 60% circa.</p> <p>La medicazione ha le seguenti peculiarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facile da applicare • morbida e conformabile • fortemente assorbente • altamente adsorbente anche se sottoposta a compressione • atraumatica per il letto della ferita ed il tessuto di granulazione • semplice ed indolore da rimuovere • compatibile con qualsiasi tipo di medicazione secondaria in base al livello di essudato delle ferite (la permeabilità ai gas ed impermeabilità a liquidi e batteri è determinata dalla scelta della medicazione secondaria) • ipoallergenica, chimicamente stabile ed inerte 														
ASSORBIMENTO	<p>>15 g di liquido/g di schiuma Normativa di riferimento UNI EN 13726-1 Metodi di prova per le medicazioni primarie a contatto con la ferita - Aspetti di assorbimento</p>														
SUPERFICIE IDROATTIVA	<p>Il prodotto è idroattivo su tutta la sua superficie:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICI</th> <th>MISURA</th> <th>SUPERFICIE IDROATTIVA (CM²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72621-00000-00</td> <td>5cm x 6cm</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>72621-00001-00</td> <td>10cm x 10cm</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>72621-00003-00</td> <td>15cm x 15cm</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>			CODICI	MISURA	SUPERFICIE IDROATTIVA (CM²)	72621-00000-00	5cm x 6cm	30	72621-00001-00	10cm x 10cm	100	72621-00003-00	15cm x 15cm	225
CODICI	MISURA	SUPERFICIE IDROATTIVA (CM²)													
72621-00000-00	5cm x 6cm	30													
72621-00001-00	10cm x 10cm	100													
72621-00003-00	15cm x 15cm	225													

CUTIMED CAVITY

MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO PER FERITE CAVITARIE

Continua/2

LATTICE	Assente, sia nel prodotto che nel processo di produzione. Assente, sia nel prodotto che nel processo di produzione. Inoltre, il prodotto non contiene altre resine o gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico.
STERILIZZAZIONE	Il prodotto è fornito sterile, sterilizzato a raggi Gamma. La sterilizzazione a raggi Gamma si effettua con metodi standardizzati e validati secondo la norma UNI EN ISO 11137 nel pieno rispetto dei requisiti di conformità della Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42 EE
ISTRUZIONI PER L'USO	Riportate nel foglietto illustrativo contenuto in ogni confezione.
CODICE CND	M04040601 MEDICAZIONI IN POLIURETANO PURO
NUMERO DI REPERTORIO	36704/R
CONFEZIONAMENTO	Unità d'uso: medicazione in busta singola Unità di vendita: confezione contenente un numero variabile di medicazioni a seconda delle dimensioni. Ogni confezione ha il marchio CE e codice a barre. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara.
CONSERVAZIONE E DURATA	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni.
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico Classe II b sterile
PRODUTTORE	Prodotto da BSN medical GmbH Amburgo, Germania, e distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20864 Agrate Brianza (MB)

CODICI	MISURA - (dim superficie idroattiva)	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIA (unità di vendita)	CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
72621-00000-00	5cm x 6cm	1 medicazione in busta individuale sterile	1 confezione da 10 medicazioni	10 confezioni
72621-00001-00	10cm x 10cm	1 medicazione in busta individuale sterile	1 confezione da 10 medicazioni	10 confezioni
72621-00003-00	15cm x 15cm	1 medicazione in busta individuale sterile	1 confezione da 5 medicazioni	10 confezioni