

SCHEMA TECNICA

Codice	5804	
Nome commerciale	Grip-lok® Dispositivo di fissaggio per cateteri vascolari	
Fabbricante	VYGON S.A. - Ecoeu (Francia)	
N° certificato CE (organismo notificato)	9554 (G-Med)	
Classe CE (conforme alla CE 93/42)	I	
Classe CND	M04010299 MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI ED ALTRO - ALTRE	
N° di Repertorio (DM 21.12.2009 e s.m.)	<ul style="list-style-type: none"> • cod. 5804.04 n° 21293 • cod. 5804.09 n° 151699 • cod. 5804.10 n° 521958 • cod. 5804.08 n° 732368 	
Sterilità	Sterile	
Tipo di sterilizzazione	Raggi gamma	
Modalità di riutilizzo	Monouso	
Apirogenicità	Apirogeno	
Presenza lattice	Latex free	
Validità	5 anni	
Materiali costitutivi	Componente	Materiale
	Corpo	poliammide, Velcro
	Adesivo	cod. 5804.04/09/10: siliconico, acrilico cod. 5804.08: siliconico, ossido di zinco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO





Vygon Grip-lok® è un dispositivo *sutureless* indicato per cateteri centrali e periferici.


Grip-lok si caratterizza per l'assenza di parti rigide permettendo un agevole posizionamento anche con guanti. Il dispositivo non necessita di suture, pertanto elimina i rischi di infezione correlati all'applicazione di fili di sutura. La sagomatura contrasta le trazioni verticali e orizzontali del catetere rendendo estremamente stabile il fissaggio. L'ancoraggio adesivo e la chiusura in Velcro consentono una fissaggio e una chiusura sicuri.

Grip-lok in condizioni ottimali mantiene la sua funzionalità anche oltre i 7 giorni dalla prima applicazione, tuttavia si raccomanda di rispettare i protocolli clinici che di norma prevedono la sostituzione dei dispositivi di fissaggio al massimo ogni 7 giorni.

I materiali costitutivi sono anallergici e traspiranti per prevenire episodi di arrossamento della cute. La confezione singola sterile permette un posizionamento completamente asettico.

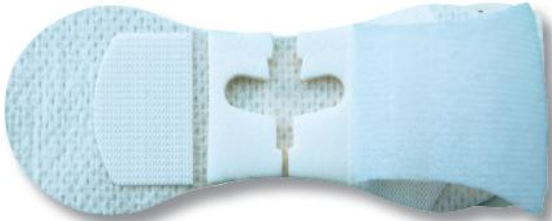SPECIFICHE TECNICHE E ILLUSTRAZIONI

Codice	Tipologia
5804.04	Conformato per alloggiare perfettamente cateteri PICC e Midline Vygon 
5804.10	Conformato per alloggiare perfettamente cateteri MaxFlo Vygon 
5804.09	Conformato per alloggiare diversi tipi di cateteri vascolari 
5804.08	Conformato per alloggiare cateteri vascolari Vygon neonatali e pediatrici 

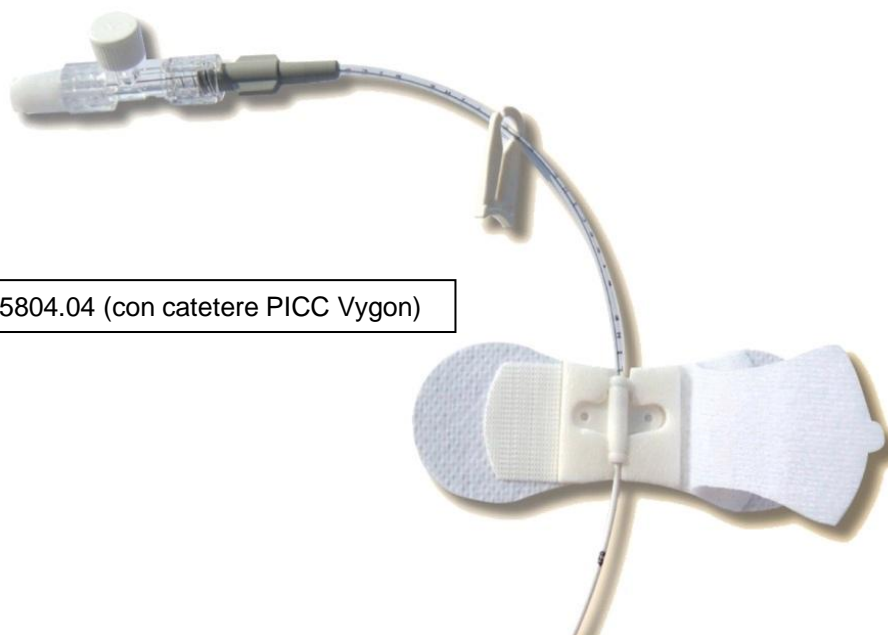

Grip-lok cod. 5804.04 (con catetere PICC Vygon)