

INTRASITE[◇] GEL

DESCRIZIONE	Medicazione a base di idrogel amorfo in confezione con applicatore <i>Applipak</i> Si conforma al letto della ferita grazie alla consistenza del gel. Aumenta l'idratazione creando e mantenendo così l'ambiente umido sulla ferita.						
DESTINAZIONE D'USO	Detersione autolitica di ferite superficiali e profonde						
STRUTTURA	Idrogel di carbossimetilcellulosa modificata parzialmente saturato di acqua						
COMPOSIZIONE	<table> <tr> <td>Carbossimetilcellulosa a legami crociati</td> <td>2,3%</td> </tr> <tr> <td>Glicole propilenico</td> <td>20,0%</td> </tr> <tr> <td>Acqua deionizzata</td> <td>77,7%</td> </tr> </table>	Carbossimetilcellulosa a legami crociati	2,3%	Glicole propilenico	20,0%	Acqua deionizzata	77,7%
Carbossimetilcellulosa a legami crociati	2,3%						
Glicole propilenico	20,0%						
Acqua deionizzata	77,7%						
COEFFICIENTE DI VISCOSITÀ	Pa.s : 200-600						
ASSORBIMENTO FLUIDI	Minimo 60 ml 0.9% p/v NaCl/100g						
METODO DI STERILIZZAZIONE	A vapore, secondo metodo validato; controlli di sterilità in accordo con la BP App. XVI 1988						
PERMANENZA IN SEDE	In caso di lesioni secche e con slough la medicazione va cambiata ogni 3 giorni. Nel caso di lesioni pulite e granuleggianti i cambi dipendono dalle condizioni cliniche della lesione e dalla quantità di essudato presente. La durata media della medicazione è 3.3 gg (range: 0-11 gg).						
CONFEZIONAMENTO	<u>Primario</u> : Applicatore in polipropilene con puntale <u>Secondario</u> : scatola di cartone						
FACILITA' D'USO	Il dispensatore con cappuccio offre la possibilità di un'applicazione semplice, direzionabile e controllabile anche in siti difficili da raggiungere. INTRASITE Gel non è aderente e può essere facilmente rimosso dalla lesione con un semplice lavaggio con soluzione fisiologica, senza danneggiare il tessuto particolarmente fragile o causare dolore inutile al paziente.						
COSTO/BENEFICIO	Il dispenser si svuota totalmente, garantendo un trattamento più economico della lesione						
PRESENZA/ASSENZA DI LATTICE E FTALATI	Il prodotto non contiene resine e gomme naturali (lattice) che rappresentino un potenziale allergenico. Non contiene ftalati.						
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE	In luogo asciutto (< 25°C)						
VALIDITA'	3 anni (a confezione integra)						
MARCATURA CE E CLASSIFICAZIONE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE Dispositivo medico di classe II b sterile. Monouso.						

STANDARD APPLICATI	BS EN ISO 14971; BS EN 556; BS EN ISO 9001; BS EN ISO 13485; BS EN ISO 10993; BS EN 980; BS EN ISO 780; BS EN ISO 17665; BS EN 1041; BS EN ISO 14644
GMDN	47764
CND	M04040501 MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO PURO
FABBRICANTE	Smith & Nephew Medical LTD – Hull – Inghilterra

Codici RDM	CODICI COMMERCIALI	Altri Codici RDM associati	QUANTITÀ IDROGEL (PER APPLICATORE)	CONFEZIONE DA	UNITÀ DI TRASPORTO
984315/R	7308	80266/R	8 g	10 applicatori	4
984316/R	7311		15 g	10 applicatori	4
984317/R	7313		25 g	10 applicatori	4