



**Conveen: guaine con striscia
SECURITY+**
(o cateteri esterni)

**Registrato nel Repertorio Nazionale dei
Dispositivi con registrazione n°7378/R**

- **Produttore:**
Coloplast AS - DK-3050 Humlebæk, Denmark
- **Distributore:**
Coloplast SpA – Via Trattati Comunitari 9 - 40127 Bologna (BO)
- **Classe CE (Direttiva 93/42/CEE):** I
- **Standard:** ISO 9001:2000, DS/EN ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 and DS/EN ISO 13485:2003
- **Ente notificatore:**
DS Certificering A/S – Identification N° 0543 – Denmark
- **Brevetti:**

CND U070201
Prodotto monouso
Non Contiene Lattice
Non Contiene Ftalati

- **Descrizione**

Conveen: guaina con striscia SECURITY + è una "manica" di forma anatomica da indossare sul pene, che termina a forma di imbuto con un tubicino di scarico adatto al collegamento con le più comuni sacche di raccolta per urina. Sulla estremità finale del tubicino c'è un anello in rilievo che consente una migliore presa durante il collegamento con la sacca. Nella parte terminale la guaina ha una particolare forma a soffiutto, per impedire eventuali attorcigliamenti con conseguente bloccaggio del flusso di urina.

Le guaine sono prodotte in diverse misure di diametro, per la massima adattabilità (vedi tabella). Il materiale di cui è composta la guaina è ipoallergenico, per consentirne l'utilizzo anche a pazienti che presentano problemi di allergia al lattice di gomma.

La guaina è dotata di un applicatore per facilitarne l'uso, e di una striscetta di carta esterna per agevolare lo srotolamento.

Per il fissaggio al pene, la guaina è dotata di una striscetta biadesiva in Curagard® con caratteristiche di elasticità e assorbimento che assicurano una perfetta tenuta stagna e l'assenza di costrizioni dolorose nei casi di variazioni del volume del pene.

- **Indicazioni**

Conveen: guaina con striscia SECURITY + è una guaina per la raccolta delle urine.

L'utilizzo di questa guaina è indicato nei casi di incontinenza urinaria grave maschile. La guaina deve essere utilizzata in collegamento con una sacca di raccolta da gamba o da letto. La guaina e la sacca costituiscono un sistema completo per la raccolta dell'urina.

• Controindicazioni e incompatibilità**• Composizione**

La guaina **Conveen Security +** è costituita di un elastomero termoplastico a base di SEBS. L'adesivo incorporato internamente è composto da polivinililene (PVE), resina sintetica e antiossidante. La striscetta biadesiva è costituita di Curagard®. Il Curagard® è un polimero termoplastico ipoallergenico, costituito da una associazione di polimeri (stirene e isoprene) e idrocolloidi (carbossimetilcellulosa).

• Sterilizzazione

NO

• Validità

2 anni dalla data di produzione

• Codici

Tipo	Codice Commerciale	Diametro in mm	Codice CND	Codice ISO	Codice GMDN
Guaina ipoallergenica	5021	21	U070201	09.24.09.003	34929
Guaina ipoallergenica	5025	25	U070201	09.24.09.003	34929
Guaina ipoallergenica	5030	30	U070201	09.24.09.003	34929
Guaina ipoallergenica	5035	35	U070201	09.24.09.003	34929
Guaina ipoallergenica	5040	40	U070201	09.24.09.003	34929

• Confezionamento

Unità d'uso 1 guaina fornita in confezione singola: ogni confezione contiene una guaina, una striscia biadesiva e un foglietto illustrativo delle istruzioni per l'uso.

Unità d'ordine 30 unità d'uso in scatola di cartone (mm) (mm) contenente istruzioni per l'uso in italiano.

Imballo 16 unità d'ordine in scatola di cartone.

Codici a barre: presenti sull'Unità d'ordine e sull'Imballo.

- **Conservazione del prodotto**

Raccomandiamo la conservazione nella confezione originale intatta al riparo dalla luce e dall'umidità, ad una temperatura costante compresa tra 15° ed i 30°.

- **Smaltimento**

Il prodotto non contiene componenti Ecotossici pertanto non necessita di particolari protocolli di smaltimento. Non disperdere nell'ambiente in quanto non è Biodegradabile.