



**Biatain® Alginate  
(Piastra e Nastro):  
Alginate**

CND M040402
Prodotto monouso
Prodotto fabbricato senza lattice di gomma naturale
Non Contiene Ftalati

- **Produttore:**

Coloplast AS - DK-3050 Humlebæk, Denmark

- **Distributore:**

Coloplast SpA – Via Trattati Comunitari Europei, 9 – 40127 Bologna (BO)

- **Classe CE (Direttiva 93/42/CEE): II b**

- **Standard:**

ISO 9001:2000 – DS/EN ISO 9001:2000 - ISO 13485:2003 – DS/EN ISO 13485:2003

- **Ente notificatore:**

DS Certificering A/S – Identification N° 0543 – Denmark

## Descrizione

**Biatain Alginate** è una medicazione altamente assorbente, costituita da alginato di calcio e carbossimetilcellulosa sodica in forma di xerogel, inseriti in una densa trama di polietilene.

Biatain Alginate, a contatto con l'essudato, si trasforma in un gel conformandosi al letto di lesione ed evitando la formazione di spazi morti, nei quali possono facilmente annidarsi i batteri, garantendo un controllo ottimale delle infezioni.

La particolare struttura favorisce un rapido assorbimento verticale dell'essudato evitando il rischio di macerazione della cute perilesionale. La medicazione è inoltre dotata di un'alta capacità emostatica grazie alla presenza di ioni calcio che, rilasciati sul letto di lesione, attivano le piastrine e favoriscono l'emostasi.

L'alta concentrazione di acido glucuronico consente di rimuovere la medicazione dal letto di lesione senza che si sfaldi, in maniera agevole e in un unico pezzo, minimizzando il rischio di danneggiare l'epitelio.

Il formato in nastro è particolarmente adatto per essere utilizzato nelle lesioni cavitarie.

## Composizione

Fibre di alginato di calcio ricco in acido glucuronico (85%), CMC sodica (15%).

## Indicazioni

Medicazione primaria per lesioni altamente essudanti, particolarmente adatto per lesioni profonde e fibrinose.

Indicato per il trattamento di lesioni da decubito, lesioni degli arti inferiori, lesioni di origine diabetica, ustioni di secondo grado, innesti, siti di prelievo cutaneo e lesioni traumatiche

Qualora lo si ritenga necessario, la medicazione può essere ritagliata prima dell'utilizzo.

Tempo di permanenza medio (lesioni e ulcere da mediamente ad altamente essudanti): 5 giorni.

## Controindicazioni e incompatibilità

**Biatain Alginate** deve essere rimosso prima di trattamenti ai raggi X, ultrasuoni, diatermici ed a micro-onde. Non utilizzare su ulcere secche o poco essudanti.

## Sterilizzazione

Le medicazioni **Biatain Alginate Piastra** e **Nastro** sono sterilizzate con ossido di etilene. Su ogni confezione compare il numero di lotto, e la data di scadenza.

## Validità

3 anni dalla data di produzione

**Codici**

<b>Codice di Repertorio</b>	<b>Codice Commerciale</b>	<b>Misura (cm)</b>	<b>Pz. / Conf.</b>	<b>Codice CND</b>	<b>Nuovo codice rimborso</b>	<b>Codice ISO</b>
37157/R	3705	5x5	30	M040402		09.21.12.003
37157/R	3710	10x10	10	M040402		09.21.12.003
37157/R	3715	15x15	10	M040402	04.49.03.103	09.21.12.003
37157/R	3740	3x44	6	M040402	04.49.03.106 04.49.21.633	09.21.12.012

