



**Biatain® Silicone:**  
Schiuma di poliuretano  
con strato adesivo in  
silicone

<b>CND M04040602</b>
<b>Prodotto monouso</b>
<b>Prodotto fabbricato senza lattice di gomma naturale</b>
<b>Non Contiene Ftalati</b>

- **Produttore:**  
Coloplast AS - DK-3050 Humlebæk, Denmark

- **Distributore:**  
Coloplast SpA – Via Trattati Comunitari Europei, 9 – 40127 Bologna (BO)

- **Classe CE (Direttiva 93/42/CEE): II b**  
ISO 9001:2000 – DS/EN ISO 9001:2000 - ISO 13485:2003 – DS/EN ISO 13485:2003


- **Ente notificatore:**  
DS Certificering A/S – Identification N° 0543 – Denmark

## Descrizione

Medicazione pluristratificata costituita da una schiuma di poliuretano, un tampone super-assorbente idrocapillare, rinforzato da uno strato in TNT, uno strato esterno in film di poliuretano ed uno strato a contatto con la lesione e la cute, in delicato silicone adesivo, non aderente, perforato.

È disponibile nelle versioni sagomate per varie zone anatomiche come Sacro, Tallone, Gomito, Trocantere, ecc.

## Composizione

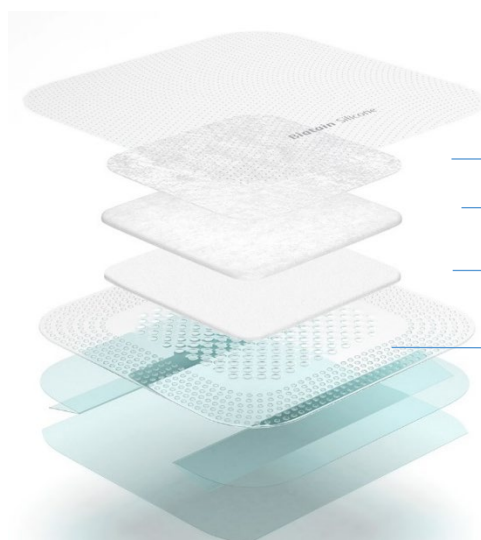

Film di PU impermeabile ai batteri e ai fluidi

Strato in TNT

Tampone super-assorbente idrocapillare

Schiuma di PU, conformabile e non aderente al letto di lesione con 3DFit® Technology

Strato perforato, in silicone adesivo, ad aderenza selettiva

Apertura in 3\* pezzi no-touch



\*apertura in 5 pezzi per Biatain® Silicone 18x18, formato tallone/gomito

La **3DFit® Technology** conferisce alla schiuma la caratteristica di intrappolare e trattenere al suo interno l'essudato; i bordi smussati e termosaldati della schiuma limitano lo stampo sulla cute perilesionale: ciò contribuisce a ridurre il rischio di perdite, macerazione dei bordi e della cute perilesionale, anche sotto compressione. Conformandosi al letto di lesione, la schiuma riempie gli spazi morti e promuove la creazione dell'ambiente umido ideale per il processo di guarigione della lesione. La schiuma è in grado di conformarsi a lesioni profonde fino a 2 cm.

### Indicazioni

**Biatain® Silicone** è indicata per un'ampia gamma di lesioni acute e croniche, da scarsamente ad altamente essudanti, come: ulcere degli arti inferiori, ulcere da pressione, ulcere del piede diabetico e lesioni traumatiche (es. lacerazioni cutanee, ferite chirurgiche e complicanze, come deiscenze, cicatrici ipertrofiche, cheloidi); grazie alla sua struttura esclusiva e allo strato in silicone adesivo, non aderente, perforato, a contatto con la lesione e la cute (con tecnologia brevettata Coloplast) ha dimostrato di proteggere dai fattori di rischio legati alla formazione delle ulcere da pressione e di provocare meno dolore durante il cambio della medicazione.

**Biatain® Silicone** è una medicazione estremamente flessibile: può allungarsi fino al 22% delle sue dimensioni. Per questa caratteristica può essere utilizzata per prevenire le flittene post-operatorie, al fine di ridurre eventuali complicazioni e migliorare l'esito del trattamento.

**Biatain® Silicone** presenta il segnalatore di cambio, grazie al quale è possibile verificare il momento preciso in cui la medicazione può essere sostituita.

Non aderisce ai punti di sutura ed è in grado di assorbire siero e sangue.

Può essere rimosso e riapplicato senza perdere le caratteristiche di aderenza.

Può essere utilizzata sia come medicazione primaria, sia come medicazione secondaria.

Tempo medio di permanenza in sito: 5 giorni.

Tutte le schiume Biatain® sono compatibili a trattamenti di risonanza magnetica e possono resistere fino a 3 Tesla: per questo motivo possono essere lasciate in situ durante l'esecuzione di una risonanza magnetica (Tesla: unità di misura della forza di un campo magnetico).

### Controindicazioni e incompatibilità

In caso di reazioni allergiche, si prega di contattare Coloplast per informazioni sui componenti. Rimuovere prima di un trattamento radioattivo (raggi X, trattamento ad ultrasuoni, diatermia e microonde).

### Sterilizzazione

Sterilizzato con ossido di etilene. Su ogni confezione compare il numero di lotto e la data di scadenza con validità pari a 3 anni dalla data di produzione.

### Codici

Codice di Repertorio	Codice Commerciale	Misura (cm)	Pz. / Conf.	Codice CND	Nuovo codice rimborso	Codice ISO
852931/R	33434	7,5x7,5	10	M04040602		09.21.12.003
852931/R	33435	10x10	10	M04040602		09.21.12.003
852931/R	33436	12,5x12,5	10	M04040602		09.21.12.003
852931/R	33437	15x15	5	M04040602	04.49.18.603	09.21.12.003
852931/R	33438	17,5x17,5	5	M04040602		09.21.12.006
852931/R	33400	10x20	5	M04040602		09.21.12.003
852931/R	33401	10x30	5	M04040602		09.21.12.006
852931/R	33404	15x19 Sacro	5	M04040602	04.49.18.603	09.21.12.012
852931/R	33405	25x25 Sacro	5	M04040602	04.49.18.606	09.21.12.012
852931/R	33406	18x18 Tallone/gomito	5	M04040602	04.49.18.603	09.21.12.012
852931/R	33408	14x19,5 Multisite	5	M04040602		09.21.12.012