

CORE-SCRUB P - Art. CS-270-P

Descrizione

Spazzolino flessibile monouso con stilo netto unghie e con spugnetta intrisa di 20 ml di soluzione detergente disinfettante

Indicazioni

Dispositivo destinato al lavaggio, pulizia e disinfezione delle mani del personale sanitario addetto alle camere operatorie.

Avvertenze

In caso di uso improprio, risciacquare abbondantemente, se necessario, consultare il medico. Evitare il contatto con gli occhi, non ingerire. **NON APPLICABILE PER ALTRE PARTI DEL CORPO.**


Stoccaggio

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Conservare a temperatura ambiente.

Modo d'uso

- Aprire la confezione dal lato "APRIRE".
- Utilizzare la parte in spugna per distribuire omogeneamente la soluzione antisettica, abitualmente in uso, sulla superficie cutanea umida. Utilizzare anche un eventuale eccesso di liquido rimanente nella vaschetta.
- Strofinare la cute di mani ed avambracci con particolare attenzione alle aree interdigitali per circa 5 minuti.
- Risciacquare mani e avambracci con acqua corrente.
- Gettare la spazzola dopo l'uso e smaltire secondo le disposizioni legislative in vigore.

Spazzolino flessibile con spugna

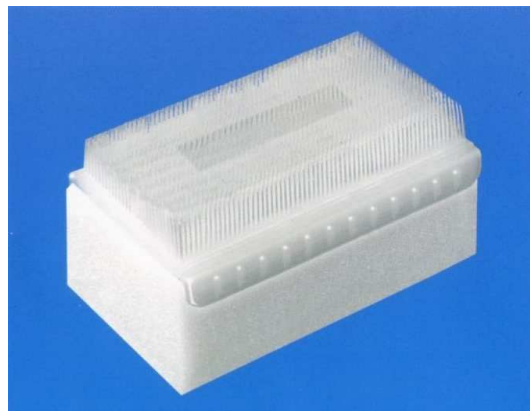


Etichetta della singola confezione



nov_paper_P_ra_r5_2015

Caratteristiche Tecniche

Materiale Impiegato	SPAZZOLA in polietilene con setole semirigide ad altezza differenziata SPUGNA in poliuretano PULISCI UNGHIE in polietilene HD		
Confezionamento	Singolo pezzo in involucro termosaldato		
Dimensione solo spazzola	Lunghezza mm 80	Larghezza mm 50	Altezza mm 15
Dimensione solo spugna	Lunghezza mm 80	Larghezza mm 50	Altezza mm 25
Dimensione complessiva Spazzola e spugna	Lunghezza mm 80	Larghezza mm 50	Altezza mm 40
Dimensione pulisci unghie	Lunghezza mm 60	Larghezza mm 10	Altezza mm 2
Composizione per 100 g. di soluzione	Povidone Iodio 7,5 g. Acqua deionizzata e coformulati q.b. a 100 g.		
Unità di vendita	9 box dispenser da 30 pezzi / cartone da 270 pezzi		
Scadenza	Prodotto con validità 2 anni (24 mesi)		
Presidio Medico Chirurgico	Registrazione n° 19531 del Ministero della Salute – D.G.F.D.M / 4450 rev. del 15 lug. 2015		

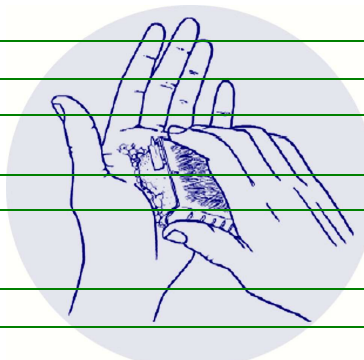

LATEX FREE

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto.
La Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Via Cacciatori, 74 /76 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483
www.coremec.it e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it