

I bisturi di sicurezza Kiato aiutano a ridurre il rischio di incidenti che possono capitare prima dell'uso, durante il passaggio del dispositivo, nelle varie fasi di utilizzo, dopo l'utilizzo e in fase di smaltimento. Il bisturi di sicurezza è progettato per essere utilizzato con una mano sola.

### 1. Chiuso



La guaina retrattile copre completamente e in modo sicuro la lama. Premere il pulsante di sblocco per ritrarre la guaina alla posizione di utilizzo. La guaina non si ritrae all'indietro senza attivazione.

### 2. Pronto all'uso



La lama è esposta e pronta all'uso. Un click sonoro conferma che la guaina è totalmente retratta.




Confezionamento in blister rigido sterile con apertura peel-open. 10 bisturi per scatola. Sulla scatola è riportato il codice colore per una rapida identificazione della misura. 10 scatole per cartone.

## Istruzioni d'uso


### Uso:

Premere il pulsante di rilascio "ON" per far scorrere la guaina di protezione indietro fino al suo arresto accompagnato da un click sonoro. La lama è esposta e pronta all'uso.

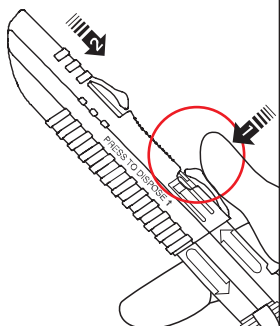


### Chiusura temporanea:

Premere il pulsante di rilascio "OFF" per far scorrere la guaina in avanti fino a quando si blocca alla posizione iniziale di chiuso.

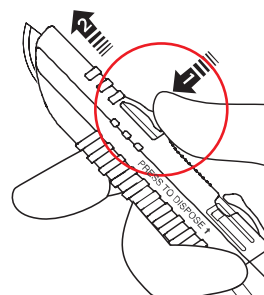


### Smaltimento:

Quando la lama è coperta premere il pulsante laterale verso il manico per il bloccaggio definitivo.

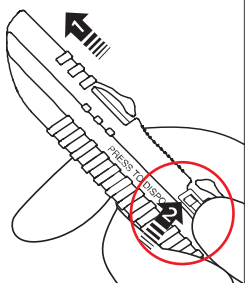


#### Step 1

Gettare negli appositi contenitori.

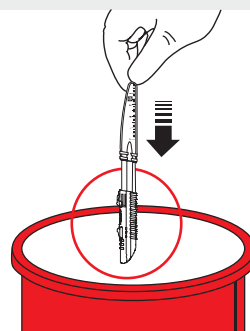

#### Step 2

- Acciaio inox svedese di ottima qualità
- Ottima affilatura per incisioni ripetute
- Istruzioni impresse sul dispositivo
- Bloccaggio sicuro della guaina di protezione

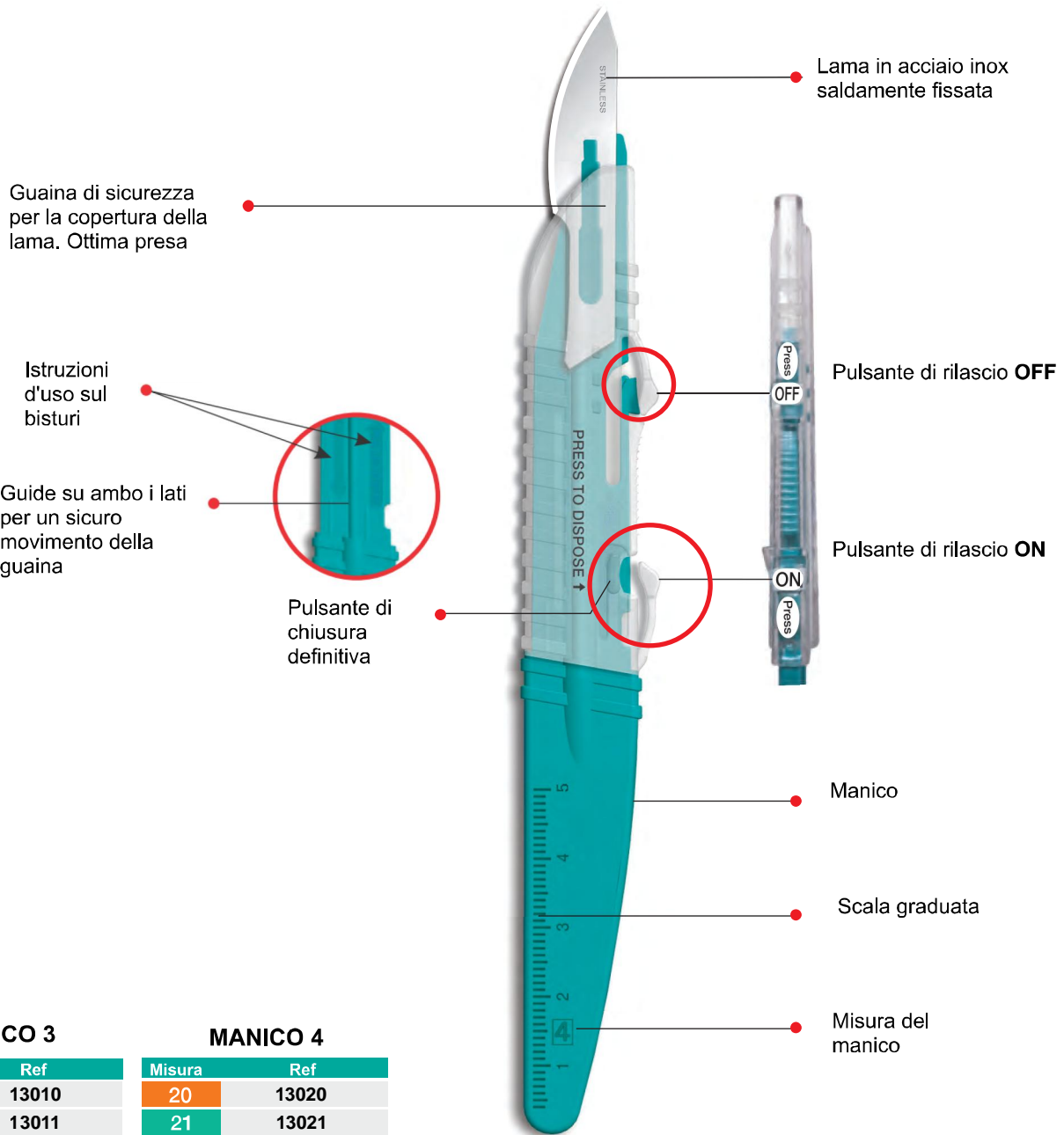

### MANICO 3

| Misura | Ref   |
|--------|-------|
| 10     | 13010 |
| 11     | 13011 |
| 11P    | 13031 |
| 12     | 13012 |
| 15     | 13015 |
| 15C    | 13026 |

### MANICO 4

| Misura | Ref   |
|--------|-------|
| 20     | 13020 |
| 21     | 13021 |
| 22     | 13022 |
| 23     | 13023 |
| 24     | 13024 |
| 25     | 13028 |



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Germany



0 4 3 4

aditya  
DISPOMED

**Aditya Dispomed Products Pvt. Ltd.**  
Plot No. 19 Sector 6 IMT Manesar  
Gurgaon Haryana I22050 India  
Tel. +91 I24 47 64 900  
Fax +91 I24 47 64 911  
info@adityadispomed.com  
www.adityadispomed.com

The smart choice for sharp blades

A subsidiary of Kehr Surgical Pvt. Ltd.