

PAVIA FARMACEUTIVI	TECHNICAL DATA SHEET SKIN REPAIR POWDER	Rev 1 del 15.11.13 Pagina 1 di 1
--------------------	--	-------------------------------------

1. NOME PRODOTTO: SKIN REPAIR POWDER

NOME COMMERCIALE: KADERMIN SCX POLVERE SPRAY

2. FABBRICANTE: PAVIA FARMACEUTICI, via Vistarino 14, Copiano (PV)

3. CLASSE: IIa Regola 4 (Dir.93/42/CEE – D.lgs.46/97)

4. COMPOSIZIONE: Silica, Caolin, SCX-COMPLEX (Silica Dioxide functionalized with Silver Ions and Chlorexidine), Sodium Ialuronate. Propellent: GPL

5. INDICAZIONE D'USO: Il dispositivo medico "SKIN REPAIR POLVERE" è un formulato in polvere che crea una barriera protettiva coadiuvante il trattamento di ferite, abrasioni, ustioni minori e in particular modo lesioni cutanee in presenza di essudato, creando un ambiente protetto dalle aggressioni microbiche e favorendo il ripristino delle normali condizioni fisiologiche utili alla rigenerazione spontanea della cute.

La funzione barriera è esplicata dall'associazione del caolino con l'acido ialuronico che hanno ciascuno una specifica azione: il caolino agisce da materiale assorbente nel caso di ferite con essudato, mentre l'acido ialuronico, idratandosi, agisce da polimero filmante e favorisce l'idratazione dei tessuti.

Il complesso SCX-Powder è costituito da bissido di silicio funzionalizzato con Ioni Argento e Clorexidina; esso è inglobato nella barriera creata dal caolino e dall'acido ialuronico. Grazie alle sue proprietà antimicrobiche garantisce che la barriera formata dal DM sia resistente agli attacchi da parte degli agenti microbici, migliorando così l'effetto della barriera protettiva sulla lesion rendendola efficace contro le aggressioni microbiche esterne.

SKIN REPAIR POLVERE è una polvere per uso topico destinata a favorire la formazione di una efficace barriera filmogena coadiuvante i naturali processi di riparazione tissutale isolando il punto di applicazione e creando un microambiente di lesion adatto a una veloce cicatrizzazione spontanea protetta da attacchi microbici esogeni.

6. USO: Prima dell'utilizzo pulire la cute ed asciugarla accuratamente. Applicare un sottile strato di polvere solo nella zona interessata. Non massaggiare. Ripetere l'operazione due volte al giorno.

7. WARNINGS Dopo l'applicazione non massaggiare la zona interessata. La polvere deve formare uno strato continuo protettivo. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente con acqua. Evitare lunghi periodi di erogazione. Uso esterno, non ingerire. Non utilizzare se la confezione risultasse aperta o danneggiata. Non sterilizzare. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti. Sospendere il trattamento in presenza di anomale reazioni cutanee. In caso di uso prolungato consultare il medico. L'applicazione, non necessita di personale medico.

8. CONTRINDICAZIONI: Non sono noti fenomeni di sovradosaggio. Ipersensibilità accertata verso i componenti. Non sono note interazioni con farmaci e sostanze medicinali.

9. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE: Tenere al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.