

# wound dressing



Revamil Wound Dressing 5x5  
Classificazione CND M040499

Revamil Wound Dressing 8x8  
Classificazione CND M040499

Revamil Wound Dressing 10x10  
Classificazione CND M040499

Revamil Wound Dressing 10x20  
Classificazione CND M040499

## Descrizione prodotto

Revamil® wound dressing è una medicazione morbida in poliacetato impregnata di miele medicale standardizzato Revamil® puro ad elevata concentrazione enzimatica. È sterilizzata a raggi gamma e non aderisce alla lesione. Garantisce una prolungata azione antibatterica grazie al lento rilascio di perossido di idrogeno al 3°/°°. L'acido gluconico crea un ambiente acido pari a pH 3,5 tale da inibire la proliferazione batterica. L'attività enzimatica del miele Revamil® e l'efficacia antibatterica favoriscono la rigenerazione cutanea.

## Indicazioni

- adatto per lesioni acute e croniche infette estese;
- per ulcere da pressione nella zona sacrale;
- ulcere vascolari, ferite chirurgiche;
- per il trattamento di lesioni al tallone;
- ustioni di 1° e 2° grado;

## Modalità d'uso

- pulire la ferita con soluzione fisiologica.
- applicare la compressa di garza impregnata di miele medicale Revamil® e coprire con bendaggio secondario.
- durante la prima settimana medicare ogni 24 h quindi ogni 48/72 h a giudizio dell'operatore sanitario.

*Distributore*  
Bfactory Italia srl  
Via G. Matteotti, 198  
46025 POGGIO RUSCO MN ITALIA

*Produttore*  
Bfactory Health Products B.V.  
Remmerdem, 58  
3911 TZ RHENEN NL

## Dimensioni e formati:

Revamil Garza 5x5 (10 garze)  
Codice registrazione 921237285  
Revamil Garza 8x8 (7 garze)  
Codice registrazione 912323639  
Revamil Garza 10x10 (10 garze)  
Codice registrazione 927144764  
Revamil Garze 10x20 (5 garze)  
Codice registrazione 921320091

## Classe di appartenenza:

II B

## Classificazione CND

M040499

## Organismo Notificato

CE 0344

Sterilizzazione Raggi Gamma

