

## FLUORO TOUCH – FIAMMIFERI di FLUORESCEINA

Codice : 002.015.038

### NOME PRODOTTO

Fluoro Touch-Fluoresceina a strisce Madhu

### CODICE ARTICOLO

Fluoro Touch

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La punta del fiammifero e' impregnata con Fluoresceina trattenuta tra due strati di carta adesiva.  
1 mg di Fluoresceina Sodica I.P.

### CARTA UTILIZZATA

Carta filtrante Whatman n. 1

### ISTRUZIONI DI UTILIZZO:

Inumidire la parte colorata della striscia con acqua sterile o soluzione oftalmica sterile. Si può utilizzare liquido lacrimale presente nel fornice inferiore.

Mentre il paziente guarda verso l'alto, toccare la congiuntiva o il fornice con la punta inumidita.

Per un risultato ottimale, il paziente, dopo l'applicazione dovrebbe sbattere diverse volte la palpebra.

### USO PREVISTO DEL DISPOSITIVO MEDICO:

Striscia monouso sterile per uso diagnostico in oftalmologia. Viene utilizzata per la valutazione nell'applicazione di lenti a contatto.

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ▪ <b>Confezionamento:</b>           | 100 fiammiferi (strisce)   |
| ▪ <b>Confezionamento primario</b>   | Singolarmente in blister sterili   |
| ▪ <b>Confezionamento secondaria</b> | Scatola  |
| ▪ <b>Certificazione:</b>            | CE 2460  |
| ▪ <b>Classe:</b>                    | I  |
| ▪ <b>Uso:</b>                       | Non utilizzare nel caso di confezionamento difettoso o prodotto scaduto.<br>Temperatura ambiente |
| ▪ <b>Stoccaggio:</b>                | Temperatura ambiente   |
| ▪ <b>CND:</b>                       | Q0299  |
| ▪ <b>RDM:</b>                       | 973468   |

### STERILIZZAZIONE - DURATA:

Singolo fiammifero in busta sterile  
Gas E.T.O seguito da sufficiente aerazione.  
Se conservata correttamente, 5 anni dalla data di sterilizzazione

### ETICHETTA PRODOTTO

Come da normativa europea



Medical Vision Group -

Via Ponte del Lepri, 28 – Bagno a Ripoli (FI)  
Tel. 055 643192 – Fax 055 4641441 – Cell. 334 3687103