

**Professional Dietetics S.p.A.**

Sede Legale e Uffici:

Via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano

Tel. (02) 744020 - Fax (02) 70008791

profdiet@pec.it



Cap. Soc. € 120.000,00 I.V.

REA 1501641

N. Reg. imprese Milano 740256/1996

Cod. Fisc. e Part. IVA 11817800151

**VULNAMIN® PWD**  
**POLVERE****SCHEDA TECNICA**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>DESCRIZIONE</b>            | Vulnamin® PWD è una medicazione interattiva a base di sodio ialuronato e aminoacidi costitutivi del collagene finalizzata a favorire la formazione di tessuto di granulazione e la rigenerazione tissutale.   |
| <b>CLASSE DI APPARTENENZA</b> | Medical Device di classe II b – CND M040499   |
| <b>MARCHIO CE</b>             | CE 0373– Ente Certificatore: Istituto Superiore di Sanità certificato n. QCT-0153-20 Addendum 66-20   |
| <b>COMPOSIZIONE</b>           | Sodio Ialuronato: 20,04%<br><br>Glicina: 38,076%<br><br>L-Lisina HCl: 7,215%<br><br>L-Leucina: 4,609%<br><br>L-Prolina: 30,06%  |
| <b>CONFEZIONE</b>             | 2 stick pack da 1g  |
| <b>MECCANISMO D'AZIONE</b>    | Vulnamin® PWD stimola la neoangiogenesi, anche in aree difficili, inducendo la formazione di tessuto di granulazione. Favorisce l'espressione di e-NOS (monossido di azoto sintetasi endoteliale) e TGFβ1 (Transforming Growth Factor); questo induce una modulazione delle iNOS (monossido di azoto sintetasi inducibile) che riduce l'infiltrato infiammatorio. Al contempo TGFβ1 stimola i fibroblasti a produrre collagene.   |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>     | È un dispositivo medico realizzato in conformità alla Direttiva 93/42/CEE MDD. Trattamento delle ulcere cutanee di varia origine, con rallentamento della cicatrizzazione, con essudato medio o abbondante, sia deterse sia colonizzate, siano esse piane o cavitare. Il prodotto non è indicato su escare. Non utilizzare su infezione franca. Nelle lesioni colonizzate è efficace se abbinato ad una medicazione secondaria antibatterica. Lesioni deterse con rallentamento della cicatrizzazione, con essudato medio o abbondante. |
| <b>MODALITÀ D'USO</b>         | Lavare e detergere la lesione. Cospargere la polvere di uno stick pack sul letto di ferita. Utilizzare medicazioni secondarie in grado di assorbire l'essudato evitando fenomeni di macerazione. In caso di lesioni particolarmente estese è possibile utilizzare più stick pack al fine di coprire la superficie interessata. La frequenza di medicazione varia fra 2 e 3 alla settimana.  |
| <b>FABBRICANTE</b>            | Professional Dietetics – Milano   |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>CONCESSIONARIO DI VENDITA</b> | Professional Dietetics – Milano |
| <b>VALIDITÀ</b>                  | 3 anni (a confezione integra)   |