



Comfeel® Plus Trasparente: Idrocolloide Sottile

CND M04040301
Prodotto monouso
Prodotto fabbricato senza lattice di gomma naturale
Non Contiene Ftalati

- **Produttore:**

Coloplast AS - DK-3050 Humlebæk, Denmark

- **Distributore:**

Coloplast SpA – Via Trattati Comunitari Europei, 9 – 40127 Bologna (BO)

- **Classe CE (Direttiva 93/42/CEE): II b**

- **Standard:**

ISO 9001:2000 – DS/EN ISO 9001:2000 - ISO 13485:2003 – DS/EN ISO 13485:2003

- **Ente notificatore:**

DS Certificering A/S – Identification N° 0543 – Denmark

Descrizione

Comfeel Plus Trasparente è una medicazione idrocolloidale adesiva con bordi smussati, caratterizzata da una buona capacità assorbente, da una alta capacità di traspirazione e da una totale trasparenza che creano l'ambiente umido ideale per il processo di guarigione delle lesioni cutanee e per la loro prevenzione, e che consentono il continuo monitoraggio della lesione.

La parte superiore in film di poliuretano semipermeabile facilita il passaggio verso l'esterno di vapore acqueo e umidità in eccesso; la superficie presenta inoltre una griglia utile e comoda per misurare le dimensioni delle lesioni. La medicazione ha l'indicatore di cambio: la parte centrale sbianca e segnala la sostituzione del prodotto quando la bolla bianca si allarga fino ad 1 centimetro dal bordo.

Indicazioni

Indicato per la prevenzione e trattamento di lesioni cutanee acute e croniche da lievemente a moderatamente essudanti in fase di granulazione e di riepitelizzazione.

Qualora lo si ritenga necessario, la medicazione può essere ritagliata prima dell'utilizzo, senza comprometterne le caratteristiche strutturali e di performance.

Tempo di permanenza medio (lesioni e ulcere con essudazione scarsa): 5 giorni.

Tempo di permanenza massimo: 7 giorni.

Controindicazioni e incompatibilità

In caso di reazione allergica, si prega di contattare Coloplast per informazioni sui diversi componenti.

Le medicazioni Comfeel Plus Trasparente devono essere rimosse prima di trattamenti radiativi (raggi X, trattamento a ultrasuoni, diatermico e a micro-onde).

Inoltre, Comfeel Plus Trasparente non deve essere utilizzato su ulcere profonde, sottominiate, quando ci sia il rischio che i bordi collassino.

Composizione

Comfeel Plus Trasparente è composto prevalentemente da CMC. Dettaglio dei componenti: sodio carbossimetilcellulosa, copolimero a blocchi stirene - isoprene, policiclopentadiene, dioctil adipato, biossido di titanio, film di poliuretano.

Comfeel Plus Trasparente non contiene gelatina animale di alcun tipo.

Sterilizzazione

Comfeel® Plus Trasparente è sterilizzato con raggi beta, a una dose minima di 2.5 Mrad. Su ogni confezione compare il numero di lotto, e la data di scadenza.

Validità

3 anni dalla data di produzione.

Codici

Codice di Repertorio	Codice Commerciale	Misura (cm)	Pz. / Conf.	Codice CND	Nuovo codice rimborso	Codice ISO
1531171/R	33530	5x7	10	M04040301		09.21.12.003
1531171/R	33533	10x10	10	M04040301	04.49.06.203	09.21.12.003
1531171/R	33536	9x14	10	M04040301		09.21.12.003
1531171/R	33539	15x15	5	M04040301	04.49.06.206	09.21.12.003
1531171/R	33542	15x20	5	M04040301		09.21.12.006
1531171/R	33545	20x20	5	M04040301	04.49.06.209	09.21.12.006
1531171/R	33548	5x25	5	M04040301		09.21.12.006