

kaltek srl

Via Liguria, 29 - 35020 SAONARA (Pd)
Tel. +39 049 8703410 Fax +39 049 8703383
Codice Fiscale e P. IVA 02405040284

Il vostro partner ospedaliero
your best hospital partner



SCHEDA TECNICA

P0645ST

PADELLA IN POLIPROPILENE

FABBRICANTE : KALTEK srl
CLASSE DM : I /REGOLA 1
CND : Y091299



DISPONIBILITA' PRODOTTO

COD.	N° RDM	TIPOLOGIA	CONFEZIONE DI VENDITA
0645	156164/R	STANDARD	20 pz.
2483	156164/R	PADELLA IN CF. SINGOLA	13 pz.
4579	156164/R	PADELLA CON COPERCHIO INSERITO	20 pz.
0949	1336358/R	PADELLA CON MANICO ERGONOMICO	20 pz.
0665	159771/R	COPERCHIO PER PADELLA	20 pz.



CARATTERISTICHE



MATERIALE

I materiali impiegati sono atossici, privi di ftalati e lattice.

PADELLA E COPERCHIO : POLIPROPILENE (PP) - latex free
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA : -10°C /+121°C (+140 °C per brevi periodi)

PADELLA COD. 0645 – 2483 – 4579

COLORE : BIANCO
DIMENSIONI : LUNGHEZZA 51 cm (MANICO COMPRESO)
LARGHEZZA 28 cm (MIS.MAX ESTERNA)

DIMENSIONI APERTURA : LARGHEZZA 23 cm
(MIS.MAX INTERNA) LUNGHEZZA 23,5 cm
PROFONDITÀ 7 cm

PESO : 360 g
CAPACITA' : circa 2500 ml*

PADELLA COD. 0949

COLORE : BIANCO
DIMENSIONI : LARGHEZZA 28 cm
LUNGHEZZA 47,5 cm (MANICO COMPRESO)
PESO : 420 g
CAPACITA' : circa 2500 ml*

*il valore è puramente indicativo - non è un DM con funzione di misura

CONFEZIONAMENTO

IMBALLO PRIMARIO : SACCHETTO HDPE - SCATOLA IN CARTONE LEGGERO (Cod. 2483)
IMBALLO SECONDARIO : SCATOLA IN CARTONE

ISTRUZIONI PER L'USO


Il prodotto è riutilizzabile previa osservazione delle indicazioni d'uso in merito alle condizioni igieniche dello stesso.

Preparazione: lavare e sanificare la padella; accertarsi che la stessa sia stata trattata con l'apposita macchina di lavaggio ad alta temperatura. In caso tale macchina non fosse disponibile lavare con acqua calda e un detergente che non lasci tracce di sostanze irritanti per la cute o le mucose.

Creare intorno al paziente un livello di intimità sufficiente ad evitargli situazioni di imbarazzo; ove possibile allontanare le persone estranee altrimenti fare uso di strutture di riparo "paravento".



Esempio di padella con manico ergonomico e coperchio inserito
L'immagine è puramente indicativa

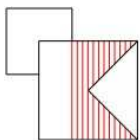

kalttek srl

Via Liguria, 29 - 35020 SAONARA (Pd)
Tel. +39 049 8703410 Fax +39 049 8703383
Codice Fiscale e P. IVA 02405040284

Il vostro partner ospedaliero
your best hospital partner

Dopo l'uso svuotare la padella dai residui organici raccolti e introdurre nella macchina di lavaggio ad alta temperatura o procedere alla pulizia manuale con acqua calda e detersivi/disinfettanti.

I dispositivi sanitari vengono commercializzati in confezioni idonee a mantenerli riparati dal contatto con polveri e altri materiali organici e inorganici diversi dalle specie microbiche. Prima dell'uso verificare l'integrità del dispositivo e seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso indicate al punto precedente.

In caso di appurate perdite dei liquidi contenuti evitare l'uso. Non porre i dispositivi a contatto o vicini a fiamme, potrebbero danneggiarsi perdendo la loro forma originaria e l'integrità. Sostituire il prodotto qualora assumesse un colore giallastro.

I dispositivi sanitari non necessitano di manutenzione, tuttavia - per una corretta conservazione - subito dopo l'uso pulire, sanificare e disinfettare il dispositivo usando detersivi che non irritino successivamente la pelle dell'utilizzatore.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

Conservare in luogo idoneo e lontano da fonti di calore.

Smaltimento: i dispositivi vanno considerati come rifiuti urbani; si raccomanda di non disperdere i prodotti nell'ambiente in quanto non biodegradabili.

CONFORMITA'

- Regolamento (UE) 2017/745
- UNI EN ISO 9001
- UNI EN ISO 13485
- UNI CEI EN ISO 14971
- UNI CEI EN 1041
- UNI CEI EN ISO 15223-1
- MEDDEV 2.4.1
- MEDDEV. 2.7.1
- MEDDEV 2.12