

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

SET COMPLETO PER AEROSOLTERAPIA IN POLIPROPILENE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.0015	121	119164	
Accessori	211 <i>Rapid adulti</i>	1575076	R03010301
	214 <i>Rapid bimbo</i>	1575090	R03010301
	123 <i>Ampolla plastica</i>	1575002	R0680
	125 <i>Boccaglio</i>	1575228	R03010380
	124 <i>Forcella nasale</i>	1575226	R03010380
	210 <i>Tube 100cm</i>	1575237	R03010303

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Dispositivo predisposto esclusivamente alla nebulizzazione di medicinali in particelle per consentire la perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie.

La nebulizzazione avviene mediante l'immissione di aria nell'ampolla attraverso l'apparecchio per aerosol terapia e la somministrazione avviene tramite l'utilizzo dell'accessorio di cura più adatto (maschera, forcella nasale o boccaglio) fornito assieme in un'unica confezione.

ACCESSORI

Maschere rapid adulti; maschera rapid bimbo; Forcella Nasale; Boccaglio; Tubo raccordato PVC cm 100

MATERIALI

POLIPROPILENE Ampolla nebulizzatrice, forcella nasale; boccaglio.

COLORANTE - RIFRA – RIFRATENE PE BLU DL/24 FNNT: coperchio ampolla.

PVC MEDICALE: maschere serie "Rapid".

PVC MEDICALE: tubo estruso da cm 100.

PULIZIA E DISINFEZIONE

Dopo l'uso svitare l'ampolla e pulire tutte le parti con acqua tiepida e detergente neutro, risciacquare con cura e lasciare asciugare su un panno pulito.

Lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente, per l'eventuale sanificazione utilizzare prodotti disinfettanti seguendo le istruzioni del prodotto stesso. Non pulire con acqua bollente, né sterilizzare a vapore.

AVVERTENZE

Manipolare con cura durante l'assemblaggio con le parti da connettere. Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché può essere utilizzato come gioco pericoloso. Manipolare con cura.

Conservare in un luogo asciutto e pulito. Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

CONFEZIONAMENTO

Tutti gli accessori sono insacchettati all'interno di un astuccio.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e l'esposizione diretta al sole.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Distributori / Distributor	For.me.sa Srl
Conformità / Compliance	Dispositivo Medico classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 <i>Medical device class IIa, in compliance with Regulation EEC 93/42</i>

ELENCO ACCESSORI

MASCHERINA RAPID ADULTI IN PVC MEDICALE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.010R	211	1575076	R03010301

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Accessorio di cura per aerosolterapia applicabile all'ampolla nebulizzatrice in plastica ed all'ampolla nebulizzatrice universale in vetro.

MATERIALI

PVC medicale (Granulo 1).

PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso.

AVVERTENZE


Manipolare con cura. Prima di ogni utilizzo esaminare visivamente la maschera per verificarne l'integrità. Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e l'esposizione diretta al sole.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Distributori <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
Campo di applicazione <i>/Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I
Conformità <i>/Compliance</i>	Dispositivo Medico classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 <i>Medical device class IIa, in compliance with Regulation EEC 93/42</i>

MASCHERINA RAPID BIMBO IN PVC MEDICALE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.010R	214	1575090	R03010301

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Accessorio di cura per aerosolterapia applicabile all'ampolla nebulizzatrice in plastica ed all'ampolla nebulizzatrice universale in vetro.

MATERIALI

PVC medicale (Granulo 1).

PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso.

AVVERTENZE


Manipolare con cura. Prima di ogni utilizzo esaminare visivamente la maschera per verificarne l'integrità. Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e l'esposizione diretta al sole.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Distributori / Distributor	For.me.sa Srl
Campo di applicazione / Application advice	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I
Conformità / Compliance	Dispositivo Medico classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 Medical device class IIa, in compliance with Regulation EEC 93/42

AMPOLLA NEBULIZZATRICE IN POLIPROPILENE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.003	123	1575002	R0680

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Dispositivo predisposto esclusivamente alla nebulizzazione di medicinali in particelle per consentire la perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie. La nebulizzazione avviene mediante l'immissione di aria nell'ampolla attraverso un apparecchio per aerosol terapia e la somministrazione avviene tramite l'utilizzo dell'accessorio di cura più adatto (maschera, forcella nasale o boccaglio).

MATERIALI

Polipropilene. Additivo colorante RIFRATENE PE BLU DL/24 FNT.

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità Massima: 7 ml. Pressione minima in uso: 0,6 bar. Pressione max. in uso: 1,7 bar.

PULIZIA E DISINFEZIONE

Dopo l'uso svitare l'ampolla e pulire tutte le parti con acqua tiepida e detergente neutro, risciacquare con cura e lasciare asciugare su un panno pulito. Per l'eventuale disinfezione utilizzare prodotti sterilizzanti seguendo le istruzioni del prodotto stesso. Non pulire con acqua bollente, né sterilizzare a vapore.

AVVERTENZE


Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché contiene parti che possono essere ingerite. Manipolare con cura. L'ampolla è un dispositivo mono-paziente. Si consiglia di usare l'ampolla per 90 trattamenti al massimo. Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e l'esposizione diretta al sole.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Distributori/ Distributor	For.me.sa Srl
Campo di applicazione/ Application advice	Adulti (Adults)  0425 Dispositivo a rischio medio di Classe IIa
Conformità/ Compliance	Dispositivo Medico classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 <i>Medical device class IIa, in compliance with Regulation EEC 93/42</i>

BOCCAGLIO IN POLIPROPILENE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.007	125	1575228	R03010380

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Dispositivo predisposto per ampolla nebulizzatrice in plastica.

MATERIALI

Polipropilene.

PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente, per l'eventuale disinfezione utilizzare prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni del prodotto stesso. Non pulire con acqua bollente, né sterilizzare a vapore.

AVVERTENZE


Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché sono parti che possono essere ingerite.
Manipolare con cura. Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e l'esposizione diretta al sole.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Distributori / Distributor	For.me.sa Srl
Campo di applicazione / Application advice	Adulti (Adults)  0425 Dispositivo a rischio medio di Classe IIa
Conformità / Compliance	Dispositivo Medico classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 Medical device class IIa, in compliance with Regulation EEC 93/42

FORCELLA NASALE IN POLIPROPILENE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.005	124	1575226	R03010380

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Dispositivo predisposto per ampolla nebulizzatrice in plastica.

MATERIALI

Polipropilene.

PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente, per l'eventuale disinfezione utilizzare prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni del prodotto stesso. Non pulire con acqua bollente, né sterilizzare a vapore.

AVVERTENZE


Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché sono parti che possono essere ingerite.
Manipolare con cura. Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e l'esposizione diretta al sole.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Distributori / Distributor	For.me.sa Srl
Campo di applicazione / Application advice	Adulti (Adults)  0425 Dispositivo a rischio medio di Classe IIa
Conformità / Compliance	Dispositivo Medico classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 <i>Medical device class IIa, in compliance with Regulation EEC 93/42</i>

TUBO RACCORDATO 100 CM IN PVC MEDICALE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.012	203	1575237	R03010303

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Tubo di collegamento tra l'ampolla per aerosolterapia e la fonte di aria compressa.

MATERIALI

PVC medicale: raccordini per tubo;
PVC medicale. tubo estruso da cm 100 a 200.

PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso.

AVVERTENZE


Manipolare con cura durante l'assemblaggio con le parti da connettere. Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché può essere utilizzato come gioco pericoloso. Verificare sempre che non vi sia la presenza di corpi estranei all'interno del tubo per permettere il corretto passaggio del flusso di aria. Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e l'esposizione diretta al sole.

SMALTIMENTO

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.

Distributori / Distributor	For.me.sa Srl
Campo di applicazione / Application advice	Adulti (Adults)  Dispositivo di Classe I

Conformità /Compliance

Dispositivo Medico classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42
Medical device class IIa, in compliance with Regulation EEC 93/42