

FARMAC-ZABBAN S.p.A.

Indirizzo

Via Persicetana, 26 - Calderara di Reno (BO)

Tel. / Fax

+39 051 – 318 411 / +39 051 – 318 472 - 318 447

e-mail

company@farmaczabban.com

Scheda Tecnica - Technical card

MEDICAZIONI ASSORBENTI

Medicazioni assorbenti monouso sterilizzabili chiuse sui quattro lati.

Latex free.

Misure: cm 10 x 10 - cm. 10 x 15 – cm. 10 x 20 – cm. 15 x 20 – cm. 15 x 25 - cm. 20 x 20 – cm. 20 x 25
cm. 20 x 30 - cm. 20 x 40.

Composizione:

- Batuffolo di cellulosa 100%, sbiancato senza cloro. Peso base 460 g/m².
- Tessuto di carta 19 g/m²
- Tessuto non tessuto di polipropilene termocollegato 18 g/m²
- Tessuto non tessuto di polipropilene saldato a vite 30 g/m² colore blu, idrofobo (Idrorepellente 140 mm. Edana test 120. 1-80).
- Fusione a caldo.

Capacità di assorbimento: 6600 g./mq. 24 ore.

Il dispositivo è classificato secondo l'allegato VIII Reg. 01 del Regolamento UE 2017/745 in Classe I.

Modalità di sterilizzazione:

Il dispositivo può essere sterilizzato previo confezionamento in ambiente microbiologicamente controllato, utilizzando sistemi e metodi di sterilizzazione conformi alle vigenti leggi in materia, o impiegando cicli e processi convalidati a Ossido di Etilene (EN 11135), Radiazioni Ionizzanti (EN 11137) o Vapore (EN 17665-1).

Confezione: Sacchetti di plastica sigillati da 25 Pz.

Marca e Casa Produttrice: FARMAC-ZABBAN S.p.A.

CLASSE I - MARCHIO CE.

FARMAC-ZABBAN S.p.A.

Indirizzo

Via Persicetana, 26 - Calderara di Reno (BO)

Tel. / Fax

+39 051 – 318 411 / +39 051 – 318 472 - 318 447

e-mail

company@farmaczabban.it

Foglietto Illustrativo per Medicazioni assorbenti

Istruzioni per l'utilizzo del dispositivo in forma NON STERILE:

- In ambiente controllato, aprire la confezione ed estrarre la medicazione.
- Utilizzare il dispositivo per normali operazioni di assorbimento degli essudati.

Istruzioni per l'utilizzo del dispositivo in forma STERILE:

- Utilizzare il dispositivo per normali operazioni di assorbimento degli essudati.

Avvertenze:

Utilizzare il dispositivo entro il termine massimo stabilito dalla data di scadenza riportata in etichetta.

Le caratteristiche del dispositivo sono garantite solo a confezione integra.

Una volta aperta la confezione ed utilizzato parzialmente il contenuto, la restante quantità deve essere conservata all'interno della stessa, racchiusa in contenitore che la preservi dal rischio di contaminazione batterica.

La carica batterica massima, a confezione originale integra è garantita inferiore a 500 U.F.C./gr.

Il dispositivo deve essere smaltito applicando la regolamentazione delle vigenti leggi in materia.

Destinazione d'uso:

Il dispositivo si utilizza per l'assorbimento degli essudati.

Controindicazioni:

Il dispositivo non deve essere utilizzato su persone con allergia a uno dei componenti del dispositivo stesso.

Modalità di sterilizzazione:

Il dispositivo può essere sterilizzato previo confezionamento in ambiente microbiologicamente controllato, utilizzando sistemi e metodi di sterilizzazione conformi alle vigenti leggi in materia, o impiegando cicli e processi convalidati a Ossido di Etilene (EN 11135), Radiazioni Ionizzanti (EN 11137) o Vapore (EN 17665-1).

Metodo di conservazione:

Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo da polveri, all'interno della confezione originale, lontano da fiamme libere ed al riparo dalla luce solare diretta.