

# CONNETTIVINA

**MEDICAZIONE ADESIVA** CEROTTO HI TECH  
imbibita di Acido ialuronico sale sodico

## Informazioni sul prodotto

**CONNETTIVINA**cerotto HI TECH è un dispositivo medico per uso cutaneo costituito da un bordo adesivo trasparente in poliuretano e un tampone centrale assorbente multistrato imbibito di una soluzione di Acido ialuronico sale sodico allo 0,3%.

La medicazione è stata sviluppata per garantire elevato comfort:

- è conformabile e ha i bordi arrotondati,
- permette la traspirazione cutanea,
- è impermeabile all'acqua
- è resistente all'acqua.

Il tampone centrale inoltre ha uno strato antiaderente per una rimozione indolore e senza traumi.

**CONNETTIVINA**cerotto HI TECH è in grado di creare un ambiente umido nel sito di applicazione, protetto verso l'esterno, tale da favorire il naturale processo di riparazione tissutale in caso di escoriazioni, abrasioni, piccoli tagli, ferite superficiali, scottature.

La soluzione di imbibizione non contiene parabeni o altri conservanti.

## Composizione

*Soluzione di imbibizione:* Acido ialuronico sale sodico 0,3% (componente principale), glicerolo, propanediolo, fenetil alcol, etilesil glicerina, acido lattico, acqua purificata.

*Supporto:* poliuretano, polistirene, polietilene, viscosa, poliestere, polipropilene, adesivo poliacrilico.


## Indicazioni

**CONNETTIVINA**cerotto HI TECH è indicato per il trattamento locale di escoriazioni, abrasioni, piccoli tagli, ferite superficiali, scottature.

## Modalità d'uso

Prima dell'applicazione pulire e asciugare con cura la zona interessata, disinfettare se necessario.

1. Afferrare le due alette della busta in alluminio contenente la medicazione adesiva, tirarle per aprire la confezione (Fig. 1) ed estrarre la medicazione. La medicazione è costituita da un lato adesivo A (azzurro) e da un lato esterno B (bianco), (Fig. 2).
2. Dapprima togliere delicatamente i due lembi della protezione azzurra del lato adesivo A della medicazione e applicare sulla lesione, facendo attenzione che il tampone imbibito sia centrato sulla zona di interesse (Fig. 3).
3. Premere e distendere la medicazione con cura per consentire la corretta adesione, evitando le pieghe (Fig.4).
4. Ad adesione avvenuta, rimuovere delicatamente i due lembi della carta protettiva bianca del lato esterno B, tirandoli lungo la linea di separazione, dal centro verso i bordi (Fig.5).

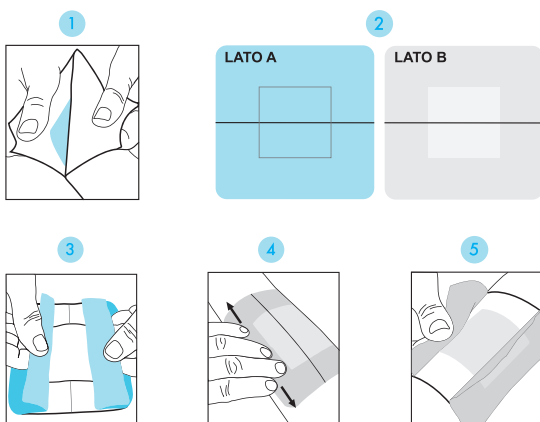

## Frequenza di applicazione

Applicare sulla zona cutanea lesa ogni 48 ore, fino a completa risoluzione, per non più di 30 giorni consecutivi.

## Controindicazioni

Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti del prodotto.

## Avvertenze e precauzioni

Solo per uso cutaneo.

Non usare contemporaneamente prodotti a base di sali di ammonio quaternario (quali ad esempio benzalconio cloruro) che possono alterare il prodotto.

Non usare il prodotto se la confezione è aperta o danneggiata.

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato correttamente nella sua confezione originale.

Ogni medicazione adesiva è monouso, ovvero deve essere usata una volta soltanto da un singolo paziente ed eliminata dopo l'uso. Se riutilizzata, Fidia Farmaceutici non può rispondere delle prestazioni, della funzionalità e delle condizioni igieniche del prodotto.

Dopo l'uso non disperdere nell'ambiente e smaltire secondo le norme nazionali vigenti.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con acqua.

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Il prodotto non è stato testato nelle donne in gravidanza, allattamento e nei bambini.

## Effetti indesiderati

Non sono note reazioni avverse con prodotti a base di Acido ialuronico.

## Conservazione

Conservare nella confezione originale a temperatura compresa tra 2°C e 25°C.

Non congelare.

## Presentazione

REF 01-01A Astuccio contenente 5 medicazioni adesive per uso cutaneo di dimensione 6x7 cm

REF 01-02B Astuccio contenente 4 medicazioni adesive per uso cutaneo di dimensione 10x10 cm

REF 01-02C Astuccio contenente 4 medicazioni adesive per uso cutaneo di dimensione 8x12 cm

REF 01-02D Astuccio contenente 4 medicazioni adesive per uso cutaneo: 2 di dimensioni 6x7cm, 1 di dimensioni 10x10 cm e 1 di dimensioni 8x12 cm.

REF 01-03E Astuccio contenente 8 medicazioni adesive per uso cutaneo: 4 di dimensioni 6x7cm, 2 di dimensioni 10x10 cm e 2 di dimensioni 8x12 cm.

Le istruzioni per l'uso sono incluse nell'astuccio.

## Fabbricante

Fidia Farmaceutici S.p.A.


Via Ponte della fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova) Italia



Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo: luglio 2019



Consultare le istruzioni per l'uso

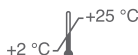

Limite di temperatura



Data di scadenza



Numero di catalogo



Codice del lotto



Resistente all'acqua



Fabbricante



Traspirante



Marchio CE e numero dell'Organismo Notificato



Impermeabile



Non riutilizzare



Conformabile



Non usare se la confezione è danneggiata