



Gel idratante nasale a base di Hydeal-D® 0.2%

Informazioni sul prodotto

La mucosa nasale svolge un ruolo estremamente importante nell'ambito della respirazione assicurando la filtrazione, l'umidificazione ed il riscaldamento dell'aria inspirata. Affinché tali funzioni siano correttamente svolte, è necessario che la mucosa sia ricoperta da un sottile film acquoso che la mantiene idratata nonostante il passaggio dell'aria che tenderebbe a seccarla.

A tale proposito è stato evidenziato il ruolo fisiologico dell'acido ialuronico che, secreto da particolari cellule della mucosa, si stratifica, assorbe una gran quantità di liquidi trasudanti e forma un velo protettivo favorendo l'idratazione e la normale funzionalità della mucosa stessa, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito dei processi di riparazione tissutale.

WET® GEL è un gel incolore che, grazie alla presenza di Hydeal-D®, un derivato dell'acido ialuronico, dona idratazione alla mucosa nasale.

WET® GEL rappresenta pertanto un adeguato complemento per favorire il ripristino del film liquido che ricopre la mucosa nasale e favorire i naturali processi riparativi.

Composizione

Componente principale: Hydeal-D® (equivalente ad acido ialuronico 0,2%)

Altri componenti: glicole propilenico, carbomer, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, sodio deidroacetato, olio di ricino idrogenato poliossi-etilenato 40, olio di menta piperita, sodio idrossido, acqua purificata.

Indicazioni


Idratazione della mucosa nasale in situazioni di secchezza; coadiuvante il naturale processo di guarigione delle eventuali microlesioni della mucosa indotte da eccessiva secchezza.

Modalità d'uso

La bomboletta di WET® GEL non contiene gas propellenti e va pertanto preparata per l'uso prima della prima applicazione. A tale scopo, impugnare il flacone come indicato in Fig. 1 e, tenendo la bomboletta in posizione verticale, spruzzare più volte (5-10) a vuoto, fino a quando si verifica la prima erogazione di gel. A questo punto la bomboletta è pronta all'uso. Non è necessario ripetere tale operazione prima delle successive applicazioni.

Applicare ora il prodotto secondo le seguenti modalità:

1. Togliere il cappuccio dell'erogatore, come indicato in Fig. 2;
2. Introdurre con delicatezza il beccuccio dell'erogatore in una narice tenendo chiusa l'altra (Fig. 3);
3. Spruzzare 1-2 volte a seconda delle necessità;
4. Rimuovere delicatamente l'erogatore dalla narice;
5. Effettuare un lieve massaggio esterno alla base del naso per distribuire uniformemente il gel all'interno (Fig. 4);
6. Ripetere l'operazione con l'altra narice;
7. Al termine pulire accuratamente l'erogatore e il cappuccio;
8. Rimettere il cappuccio.

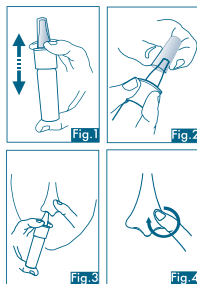

Frequenza di applicazione

Applicare il prodotto 3 o 4 volte al giorno fino a risoluzione, per non più di 30 giorni consecutivi.

Controindicazioni

Non usare in caso di accertata ipersensibilità individuale ai componenti del prodotto.

Precauzioni ed avvertenze

Il prodotto è ad esclusivo uso nasale.

Ogni confezione di WET® GEL deve essere utilizzata per un solo paziente al fine di preservare le condizioni igieniche del prodotto.

WET® GEL non è stato testato nelle donne in gravidanza, allattamento e nei bambini.

Non usare contemporaneamente a prodotti a base di sali di ammonio quaternario (ad esempio benzalconio cloruro), che possono alterare il prodotto.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sull'astuccio e sulla bomboletta.

Non disperdere i contenitori vuoti nell'ambiente e smaltire secondo le norme vigenti.

Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata in modo tale da compromettere l'integrità del contenitore.

La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato correttamente nel suo contenitore originale. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Effetti indesiderati

Non sono note reazioni avverse con prodotti a base di Hydeal-D®.

Conservazione

Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Non congelare.

Confezione

Astuccio contenente una bomboletta da 20g munita di erogatore nasale a getto con cappuccio.

Le istruzioni per l'uso sono incluse nell'astuccio.

Fabbricante

Fidia Farmaceutici S.p.A.

via Ponte della Fabbrica 3/A - 35031 Abano Terme (PD) – ITALIA



Data di emissione dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso: Settembre 2019



Consultare le istruzioni per l'uso



Data di scadenza



Codice del lotto



Non utilizzare se l'imballaggio non è integro



Limite superiore di temperatura



Fabbricante