


TEAR TOUCH BLU – Test Lacrimale

Codice : 002.015.051

Tear Touch Blu

Schirmer Strips

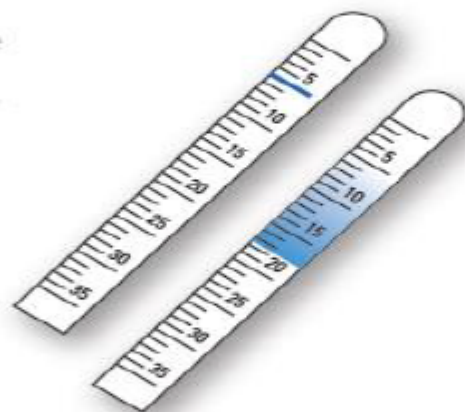

Diversamente dal normale Test di Schirmer, il **TEAR TOUCH BLU** permette di visualizzare perfettamente la quantità della lacrima grazie alla evidenziazione in **BLU** della scala dello strip.

Grazie a questa evidenza, è molto semplice comparare la situazione dell'occhio secco **prima e dopo** un trattamento, oppure permette di confrontare i Test effettuati in momenti diversi.

CE



Lo **SCHIRMER TEAR TOUCH BLU** viene utilizzato per determinare la secrezione lacrimale totale.

Questo Test permette di visualizzare la misurazione acquisita che viene evidenziata dalla colorazione **BLU** sulla striscia.

1. Prima di eseguire il test, informate il paziente che questo è un Test necessario per avere informazioni per la sua secrezione lacrimale. Spiegate che è un Test innocuo ed indolore ma che può essere a volte leggermente irritante.
2. Non esporre l'occhio del paziente ad alcuna medicazione topica o manipolazione. Evitare la luce diretta sull'occhio del paziente, posizionando adeguatamente la testa.
3. Aprire la bustina usando il pollice e l'indice di entrambe le mani.
4. Tirare le estremità aprendo la bustina fino a circa metà della sua lunghezza.
5. Rimuovere delicatamente la striscia, tenendo solo la parte piatta.
6. Inserire la parte arrotondata della striscia nel margine temporale inferiore dell'occhio, mentre il paziente guarda in su, assicurarsi che la striscia sia inserita in maniera confortevole.
7. Dopo 5 minuti potete rimuovere il Test lacrimale e vedrete la misurazione evidenziata in **BLU**.

NOTE DA OSSERVARE DURANTE IL TEST STANDARD DI ROUTINE:

- A) I test lacrimali devono essere effettuati sull'occhio prima che qualsiasi medicazione (specialmente anestetici locali) o altra procedura, ad esempio la manipolazione delle palpebre, venga effettuata.
- B) Il test deve essere eseguito senza anestesia locale.
- C) Si deve fare attenzione a non toccare la cornea con la striscia; questo contatto invaliderebbe il Test.
- D) Il paziente potrà continuare a sbattere le palpebre normalmente anche se alcuni potrebbero preferire tenere gli occhi chiusi.

Una secrezione normale dovrebbe inumidire 15 mm. o più della striscia misurata.
Lecture inferiori sono considerate normali in tarda età, meno di 5 mm. è anormale.

Classe di appartenenza:	Im
Certificazione :	CE 0434
Confezionamento:	100 pz.
Confezionamento primario:	Singolarmente in blister sterili
Confezionamento secondario:	Scatola
Sterilizzazione:	Ossido di Etilene
Uso:	Non utilizzare nel caso di confezionamento difettoso o prodotto scaduto
Stoccaggio:	Temperatura ambiente.
CND:	Q0299
RDM:	973476

Medical Vision Group -

Via Ponte del Lepri, 28 – Bagno a Ripoli (FI)
Tel. 055 643192 – Fax 055 4641441 – Cell. 334 3687103