

CORE-SCRUB P – CS-270-P

Descrizione

Spazzolino flessibile monouso con stilo netta unghie e con spugnetta intrisa di 20 ml di soluzione detergente disinfettante

Indicazioni

Dispositivo destinato al lavaggio, pulizia e disinfezione delle mani del personale sanitario addetto alle camere operatorie.

Avvertenze

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Non ingerire, non disperdere nell'ambiente.
NON APPLICABILE PER ALTRE PARTI DEL CORPO.


Stoccaggio

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari.
Conservare a temperature non superiori a 30°C.

Modo d'uso

- Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso.
- Aprire la confezione dall'angolo "OPEN", in accordo con gli accorgimenti di procedure sterili.
- Estrarre il prodotto e versare sulla spugna l'eventuale liquido residuo rimasto nel contenitore.
- Inumidire mani e avambracci.
- Applicare direttamente la soluzione disinfettante utilizzando il lato della spugna sulle mani ed avambracci e strofinare uniformemente per 5 minuti più 1 minuto per pulire le unghie con l'apposito stilo nettaunghie.
- Risciacquare con abbondante acqua di rubinetto.
- Smaltire l'intero kit (contenitore vuoto, spugna e stilo nettaunghie) nel contenitore dei rifiuti pericolosi.
- Utilizzare una spugna ed uno stilo nettaunghie per applicazione; da 1 a 4 applicazioni al giorno.

Spazzolino flessibile con spugna

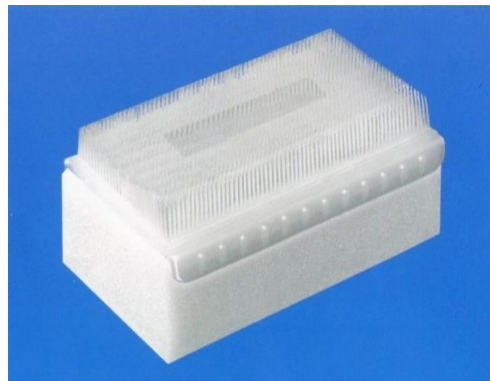

Etichetta singola confezione



Caratteristiche Tecniche				
Materiale Impiegato	SPAZZOLA in polietilene con setole semirigide SPUGNA in poliuretano PULISCI UNGHIE in Polipropilene			
Confezionamento	Singolo pezzo in involucro termoformato con chiusura Peel-Off			
Dimensione solo spazzola	Lunghezza mm 80	Larghezza mm 50	Altezza mm 15	
Dimensione solo spugna	Lunghezza mm 80	Larghezza mm 50	Altezza mm 25	
Dimensione complessiva	Lunghezza mm 80	Larghezza mm 50	Altezza mm 40	
Dimensione pulisci unghie	Lunghezza mm 60	Larghezza mm 10	Altezza mm 2	
Composizione per 100 g. di soluzione	- Polyvinylpyrrolidone iodine7.5 g - Sodium laureth sulphate1.5 g - Acqua e coformulati			
PERICOLO 	H318: Provoca gravi lesioni oculari H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata P280: Proteggere gli occhi P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un medico P273: Non disperdere nell'ambiente P410: Proteggere dai raggi solari. P233: Tenere il recipiente ben chiuso. P411: Conservare a temperature non superiori a 30°C P501: Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.			
Test di efficacia	EN 13624 - Attività fungicida o levuricida in campo medico (fase 2, stadio 1) EN 13727 - Attività battericida in area medica (fase 2, stadio 1) EN 12791 - Disinfezione chirurgica delle mani (fase 2, stadio 2)			
Unità di vendita	CS-270-P - Box da 270 pz contenente 9 dispenser da 30 pz			
Scadenza	Prodotto con validità 6 mesi			
Prodotto Biocida PT-1	AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE IT/2024/0958/AUT (ai sensi del Reg. UE n. 528/2012)			

LATEX FREE

La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto.
La Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.

COREMEC S.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39 011-35.89.481
www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC S.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti ST_CS270P - revisione 6 - gennaio 2025