


STERILENS®

STERILENS ONE
plus

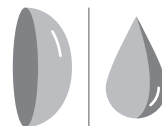

SOLUZIONE UNICA

con Acido ialuronico

INDICATA PER OCCHI SENSIBILI • PER TUTTI I TIPI DI LENTI A CONTATTO (COMPRESSE QUELLE IN SILICON HYDROGEL)

INDICAZIONI

Soluzione polivalente per la disinfezione, conservazione, pulizia, idratazione, lubrificazione, risciacquo e rimozione dei depositi proteici di tutti i tipi di lenti a contatto, comprese quelle al silicone hydrogel.

Indicata per portatori sensibili con predisposizione alla secchezza oculare. Contiene portalenti con ioni argento.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Lavarsi ed asciugarsi accuratamente le mani. **2.** Togliere la lente, metterla sul palmo della mano, strofinarla delicatamente su entrambi i lati con la soluzione. **3.** Risciacquare per eliminare ogni deposito. **4.** Porre le lenti nell'apposito astuccio, riempire con la soluzione. **5.** Per disinfettare le lenti lasciarle nella soluzione per almeno 4 ore o meglio tutta la notte. **6.** Prima di togliere le lenti dall'astuccio agitare leggermente. **7. Le lenti sono ora pronte per l'uso.** **8.** Gettare la soluzione e richiudere il contenitore.

AVVERTENZE

- Il prodotto è sterile fino alla prima apertura del flacone
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso
- Utilizzare il prodotto entro 90 giorni dalla prima apertura
- Non congelare, tenere lontano da fonti di calore
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non ingerire
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ad uno dei componenti.

COMPOSIZIONE

Soluzione isotonica e tamponata a pH 7,2 contenente: Poliesametilene biguanide (0,0001%), Mirapol A15, Sodio Edetato, Methyloxirane polymer e Sodio ialuronato.

LEGENDA



Consultare le istruzioni d'uso



Cautela



Proteggere dalla luce



Numero di lotto



Non utilizzare in caso di imballaggio danneggiato



Fabbricante



Sterilizzato usando tecniche di processo asettiche



Marcatura CE di conformità



Data di scadenza



Medical Device

Prodotto da:

 Schalcon Spa

Viale Enrico Ortolani, 195 - 00125 - Roma, ITALIA

Eurospital
PHARMACEUTICAL 

Distribuito da:

Eurospital Spa

Via Flavia, 122 - 34147 - Trieste, ITALIA

www.eurospital.it - info@eurospital.it



0477

STERILE A



Dispositivo Medico

